

RU-800S

PORTABLE PASİF JİMLASTİK CİHAZI

KULLANIM KLAVUZU



Portable Ems stimulation machine RU-800S

Sevgili müşterimiz, ürünümüzü satın aldığınız için teşekkürler!
En iyi deneyim ve güvenlik için lütfen herhangi bir işlemde
önce bu kullanım kılavuzunu okuyun.
Lütfen ileride başvurmak üzere kullanım kılavuzunu saklayın.

• Giriş

RU-800S Vücut Şekillendirme Cihazı: Müşterilerinizin İhtiyaçlarına Göre Tasarlanmış!

RU-800S Vücut Şekillendirme Cihazı, müşterilerinizin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, kullanımı kolay ve etkili bir cihazdır.

Cihazın Özellikleri:


- **Müşteri Odaklı Tasarım:** RU-800S, her müşterinin ihtiyacına özel çözümler sunmak için tasarlanmıştır.
- **Kolay Kullanım:** Cihazın kullanımı oldukça basittir ve herhangi bir özel eğitim gerektirmez.
- **Çok Yönlülük:** RU-800S, meme küçültme, meme kaldırma, meme dolgunlaştırma, lenfatik drenaj ve detoks gibi birçok farklı amaç için kullanılabilir.
- **Bilimsel Temelli Teknoloji:** Cihaz, biyo dalga prensibi ve mikro akım teknolojisi gibi bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler kullanır.
- **Güvenli ve Etkili:** RU-800S, FDA onaylı ve klinik olarak test edilmiş güvenli ve etkili bir cihazdır.

RU-800S Vücut Şekillendirme Cihazı ile Neler Yapabilirsiniz?

- **Meme Küçültme:** RU-800S, fazla yağları ve dokuyu nazikçe yok ederek memelerinizi küçültmenize yardımcı olabilir.
- **Meme Kaldırma:** Cihaz, sarkık memeleri kaldırarak daha dolgun ve dik görünmesini sağlayabilir.
- **Meme Dolgunlaştırma:** RU-800S, doğal yollarla meme dolgunluğu ve hacmi kazandırmak için kullanılabilir.
- **Lenfatik Drenaj:** Cihaz, lenfatik sistemi uyararak toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir.
- **Detoks:** RU-800S, genel detoks ve sağlıklı bir vücut için kullanılabilir.



Gösterge paneli

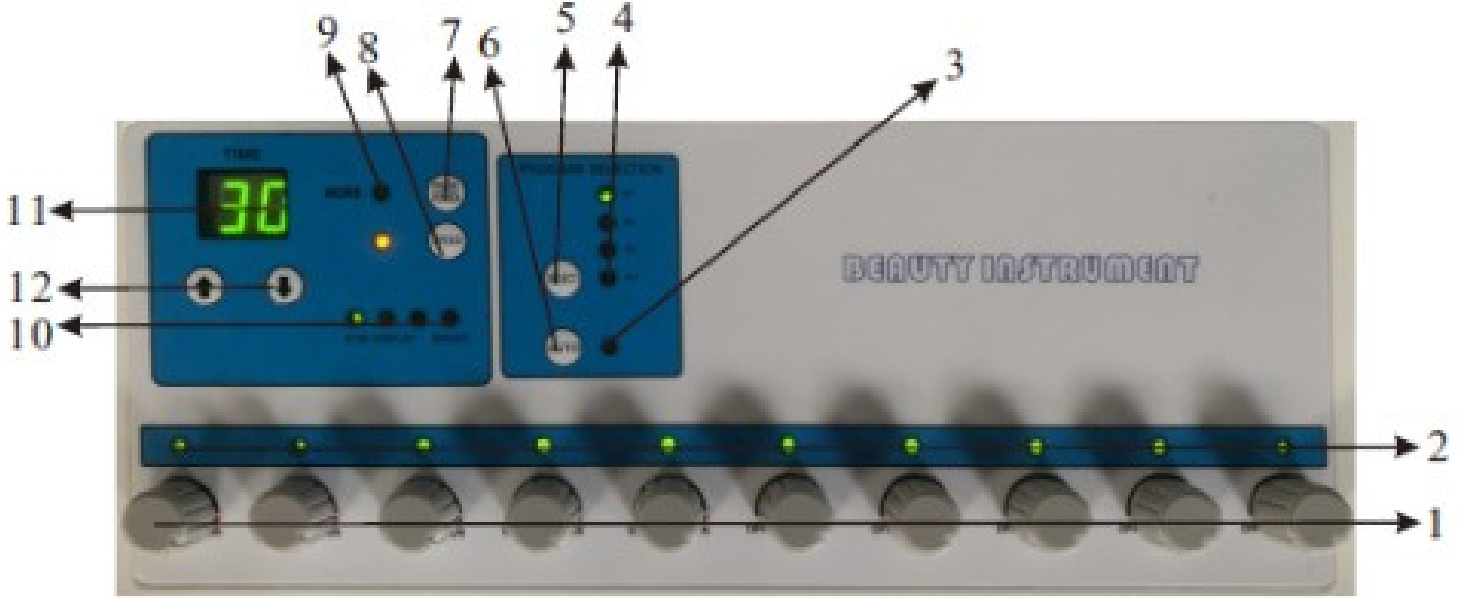

1. Çalışma yoğunluğu ayar düğmeleri
2. Her setin gösterge ışığı
3. Otomatik mod gösterge ışığı
4. P1, P2, P3, P4 çalışma modu gösterge ışığı
5. P1, P2, P3, P4 çalışma modu seçme düğmesi
6. Otomatik mod seçme düğmesi
7. Güç düğmesi
8. Çalışma dalgası seçme düğmesinin frekansı
9. Güç gösterge ışığı
10. Çalışma dalgası gösterge ışığı
11. Çalışma süresi gösterge çerçevesi
12. Çalışma süresi ayarlama düğmesi

İşlevler

- Kilo verme: Mikro akım ile kas sinirlerini uyarır, hızlı koşarken veya jogging yaparken ortaya çıkan ritimlerde genişleme ve geri çekilme hareketleri oluşturur, böylece kilo vermede iyi bir etki sağlanabilir.
- Vücut şekillendirme: Gevşek kasları basitçe çalıştırarak çalıştırılmayan kasları sıkılaştırmak için koşma, ip atlama, mekik çekme gibi sert egzersizlerle kasların uyarılmasını taklit edin)
- . Göğüs bakımı (sıkılık): Pektoralis majör, pektoralis minör ve serratus kaslarını güçlendirmek için göğüs genişletme egzersizini taklit edin, mikro akımla kas sinirlerini uyarın, anterior, epidermis ve "dermisteki kılcal damarları ve sinirleri uyarın, oksijen ve besin sağlamak için hücrenin hidrasyon üretimini sağlayın, sarkık göğsün elastikiyetini geri kazanın.
- . Lenf drenajı: Lenfosineziyi güçlendirerek arter, vena ve lenf damarlarındaki sıvıların daha hızlı akmasını sağlar. Böylece hücre metabolizmasına bol oksijen ve besin sağlanabilir, metabolizma sırasında üretilen atık ve toksinler dışarı atılır.

Kullanım Talimatı

1. Güç hattını bağlayın ve güç anahtarına basın. Yoğunluk ayar düğmelerinden herhangi biri sıfıra döndürülmemişse, zil sesi duyulacaktır.

2. P1 - P4 arasından bir çalışma modu seçmek için "SELECT" düğmesine basın veya "AUTO" düğmesine basın. P1 - P4 arasından bir mod seçilirse, ilgili gösterge ışığı yanacaktır, otomatik mod seçilirse, Otomatik mod gösterge ışığı yanacaktır.

3. Çalışma dalgasının frekansını seçmek için "SPEED" düğmesine basın.

Otomatik modu seçerseniz bu adımı atlayın.

4. Çalışma süresini ayarlayın.

5. Elektrotları prize takın, işlem gören kısma yerleştirin ve sabitlemek için kemeri kullanın. Lütfen bunları kalbe doğru koymayın. Elektrotların nasıl yerleştirileceğine dair gösterge şemasına bakın.

6. "PAUSE/START" düğmesine basın ve makine çalışmaya başlayacaktır.

İlgili düğme ile yoğunluğu müşterinin dayanabileceği uygun bir seviyeye ayarlayın.


İşlem bittikten sonra gücü kapatın.

Elektrotların nasıl yerleştirileceğine dair gösterge şeması

Elektrotları 10 sete ayırın, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi parçanın üzerine yerleştirin. Elektrotları koymak için yeterli yer yoksa, bir elektrotun 1/4 veya 1/3'ünü başka bir elektrotla kapatabilirsiniz. Elektrodu vücudun iki tarafında kesiştirmeyiniz. Eğer iki kısımda uygulama yapılacaksa, lütfen elektrotların sırasını erteleyin.

Örneğin: Hem karında hem de bacakta uygulama yapılıyorsa, elektrotların sırası

karındaki elektrotların sırası 1, 2.. ve bacadaki 5, 6.. olacaktır.

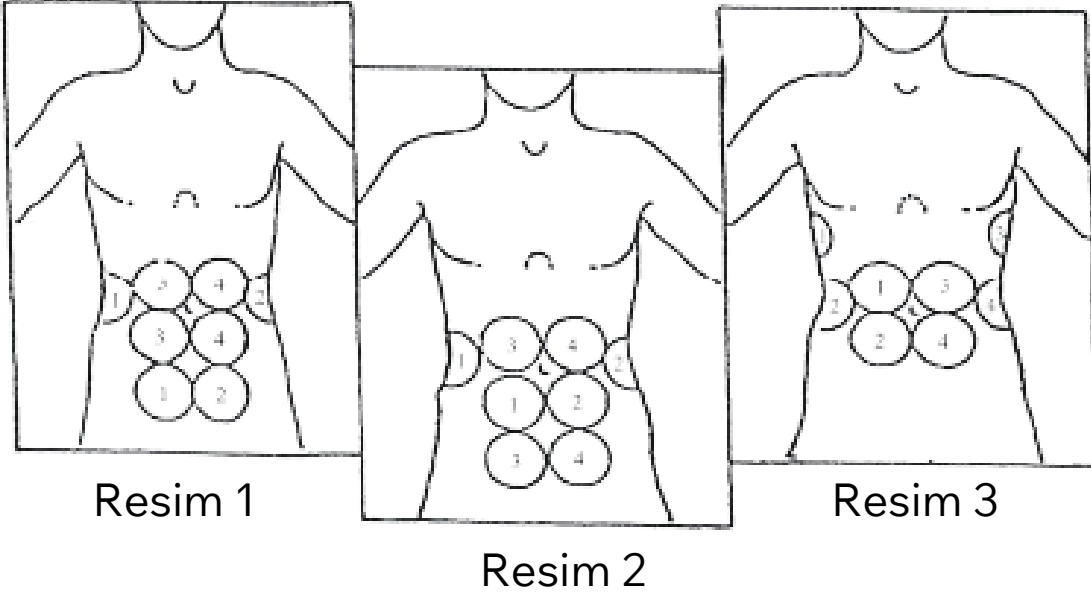


Resim 1, 2, 3 bel ve karın bölgesini işlem görünmektedir.

Elektrotları Resim 1'deki gibi yerleştirerek ön karın ve göbük yağlarını azaltabilirsiniz.

Resim 2'deki gibi yerleřtirmek sarkık karnı düzeltebilir.

Resim 3'teki gibi yerleřtirmek belin her iki tarafındaki yağı azaltabilir ve sarkık beli kaldırabilir.

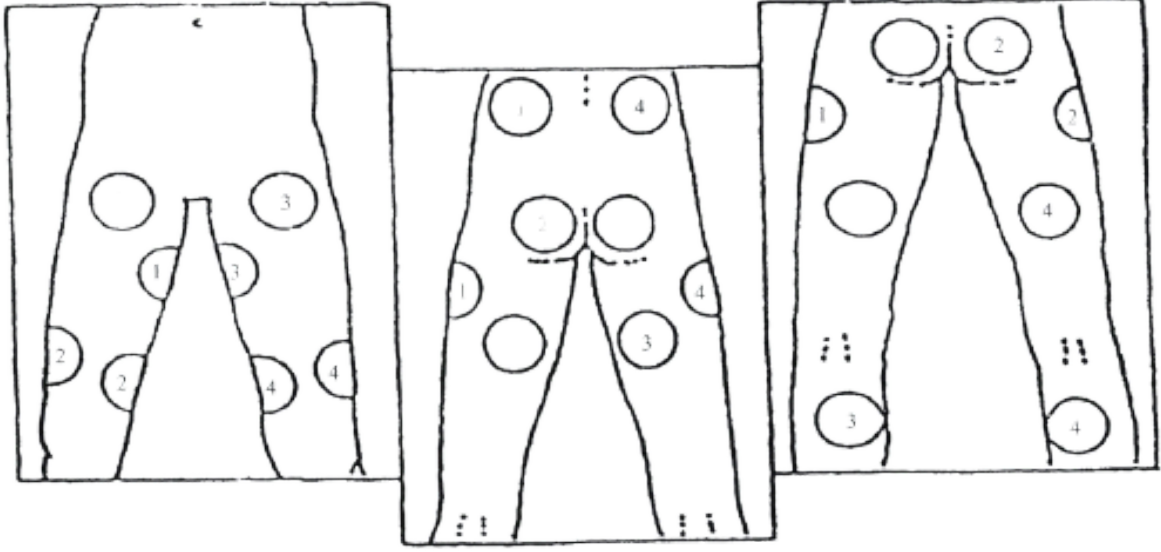

Resim 7


Resim 8

Resim 9

Resim 4'teki gibi yerleştirildiğinde bel ve karın altı yağları azaltılabilir.

Resim 5'teki gibi yerleştirmek iç ve dış uyluktaki yağları azaltabilir ve bu bölgelerdeki gevşek kasları sıkılaştırabilir.

Resim 6'daki gibi yerleştirmek kucak ve iç uyluktaki yağları azaltabilir ve bu bölgelerdeki gevşek kasları sıkılaştırabilir.

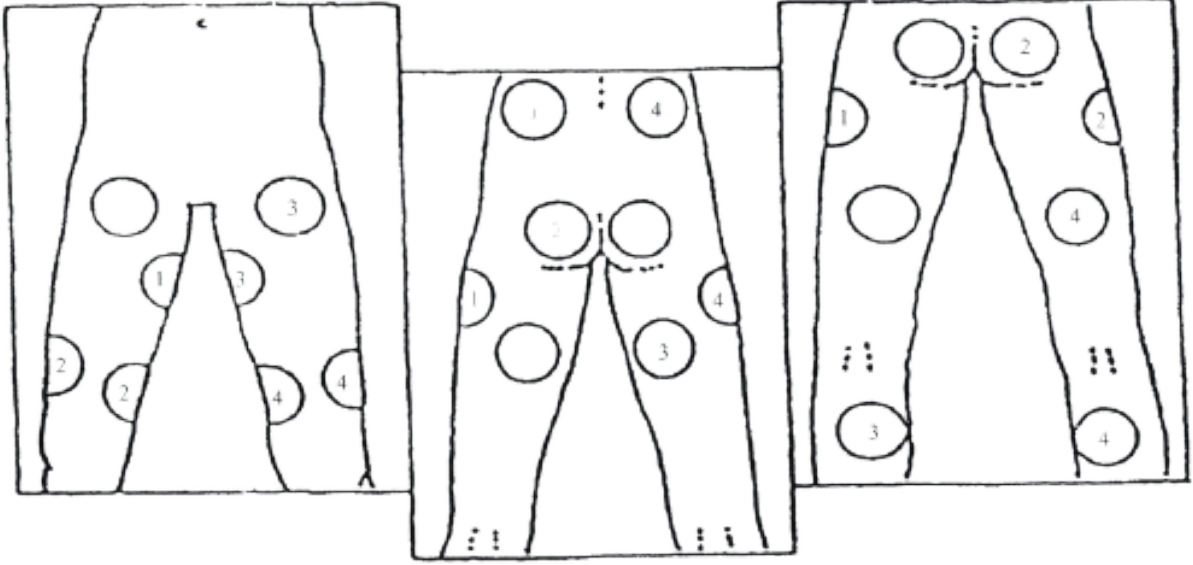

Resim 7


Resim 8

Resim 9

Resim 7'deki gibi yerleřtirmek kucak ve üst iç uyluktaki yağları ve diz üstündeki yağları azaltabilir ve bu kısımların gevşek kaslarını sıkılařtırabilir.


Resim 8'deki gibi yerleřtirmek üst ve alt kalçadaki yağları ve dış uyluktaki yağları azaltabilir ve bu kısımların gevşek kaslarını sıkılařtırabilir.

Resim 9'daki gibi yerleřtirmek orta ve alt kalçadaki yağ, dış ve sırt uyluktaki yağ ve baldırdaki yağ azaltabilir. Ve bu bölgelerdeki gevşek kasları sıkılařtırabilir.

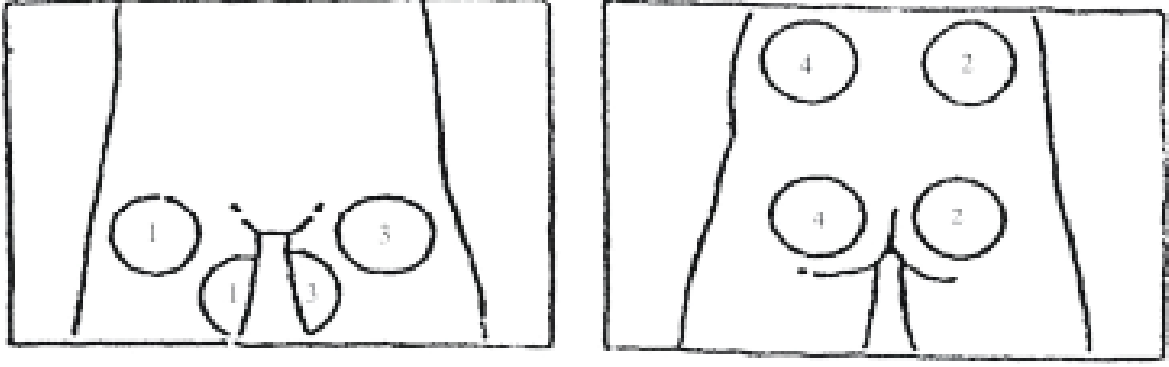




Resim 10

Resim 10'daki gibi bir yer kucak ve iç uyluktaki yağları, üst ve alt kalçadaki yağları azaltabilir ve bu bölgelerdeki gevşek kasları sıkılaştırabilir.


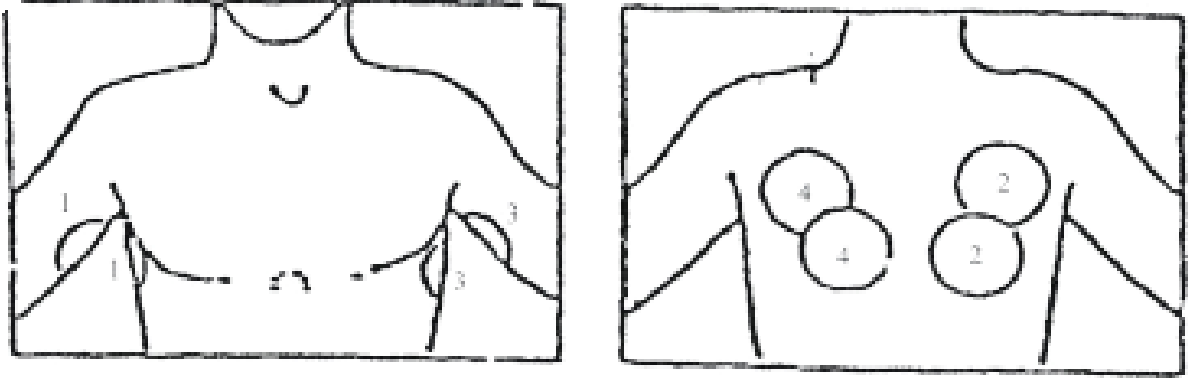


Resim 11

Resim 11'deki gibi bir yer, kolun iç kısmındaki ve kürek kemiğindeki yağları ve sırttaki yağları azaltabilir. Ve bu bölgelerdeki gevşek kasları sıkılaştırabilir.

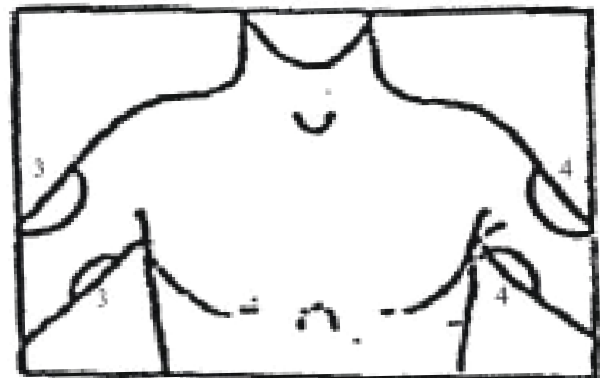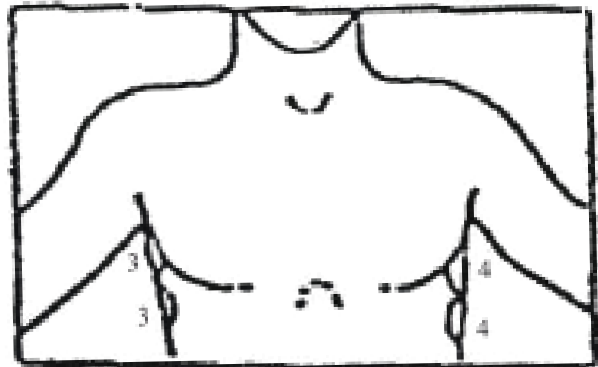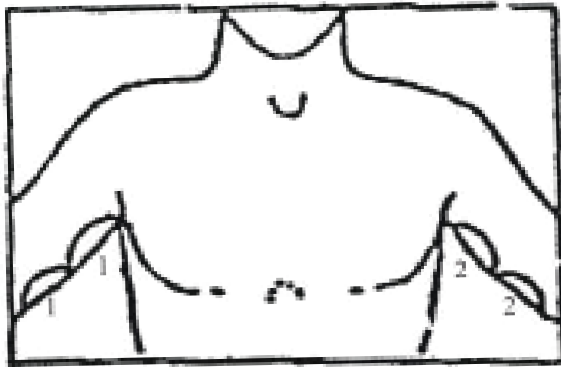

Resim 12

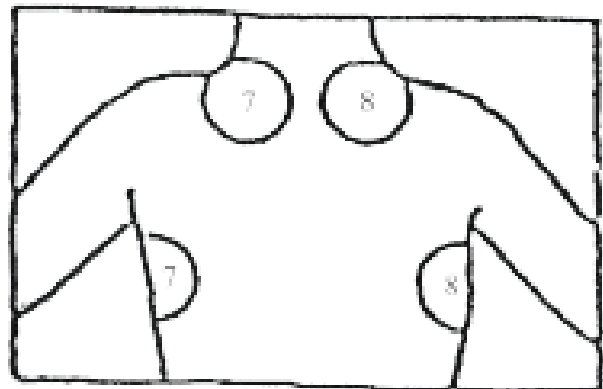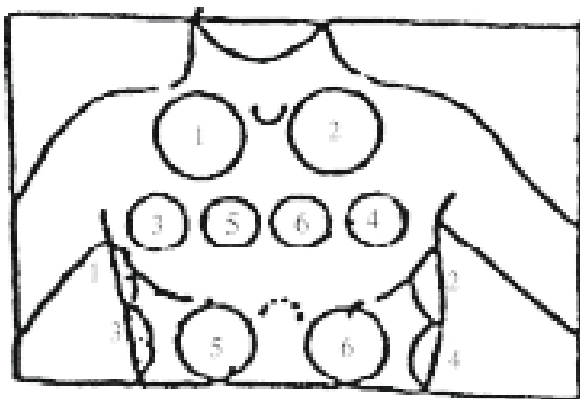

Resim 13

Resim 12'deki gibi bir yer, iç ve dış koldaki yağları ve oksterin altındaki yağları azaltabilir. Ve bu kısımlardaki gevşek kasları sıkılaştırabilir.

Resim 13'teki gibi yerleştirmek göğüs çevresindeki yağları azaltabilir, dolaşımını hızlandırabilir ve bağları uyarabilir.

Uyarılar

- Lütfen elektrotları yaralı ve iltihaplı kasların üzerine yerleştirmeyin.
- Lütfen elektrotları 10 ay içinde ameliyat edilmiş kısımlara yerleştirmeyin.
- Lütfen yemekten sonraki 1 saat içinde karın bölgesine uygulama yapmayın.
- Kalp hastalığı olan kişiler lütfen bu makineyi kullanmayınız.
- Ciddi mide hastalığı, enterohepatit, vezikal taş ve nefroliti olan kişiler lütfen bu makineyi kullanmayın.
- Epilepsi ve alkolizm hastaları lütfen bu makineyi kullanmayınız.
- Hamile kadınlar lütfen bu makineyi kullanmayın.



Portable Ems stimulation Machine RU-800S

Üretici Firma :

CYNTHIA

Manufacturer: **Guangzhou Cynthia Beauty Equipment Co.,Ltd**
3 Floor, 3 Building, Shunxiang Industrial Zone, Jiahe Street, Baiyun

İthalatçı Firma :

EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :

ÜN VANI: EAST MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD.

NO:11/C KARATAY/KONYA

Müşteri Hizmetleri : +90 (850) 255 42 42

Firma İmza ve Kaşesi :

**EAST MEDİKAL**
MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Fevziçakmak Mah. 10659. Sk. Yakamoz Cd. No:C11
Tel: 0533 693 25 42 Karatay/KONYA
Selçuk V.D 3231 205 560

Azami Tamir Süresi : 30 Gün

Garanti Süresi : 1 Yıl

Belge Numarası :

Belge Tarihi :

Markası : CYNTHIA

Modeli : RU-800S

**Cinsi : PORTATİF PASİF
JİMLASTİK CİHAZI**

SATICI FİRMANIN :

Ünvanı :

Adresi :

Tel :

Fatura Tarihi ve Numarası :

Tarih :/...../202...

İmza :

KAŞE

GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, ürünlerin garanti süresi içinde bedelsiz olarak onarımı söz konusudur.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma, çizme, kimyasal, elektrokimyasal ve elektronik etkiler) kullanılan tesisattan kaynaklı hatalar,
2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşuları,
3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler),
4. **SU SIÇRAMALARI** Sonucu elektronik veya mekanik parçalara verdiği hasarlar,
5. Cihaz kullanırken veya ilk devreye alınana kadar emin olun orta koşullarının uygun olmamasından doğan sorunlar (toz, temizlik, kurum, kapak, su, nem, bakım eksikliği, vb.)
6. Kireç, çamur, çapak, demir ya da pisliklerinden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve hasarlar
7. Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar
8. Elektrik tesisatında sigorta kullanımı, elektrik tesisatında topraklamadan kaynaklanması sorunlar. Kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yüksek ya da alçak ihtiyaçtan kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.[2]
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1. Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
4. İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
5. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.