

G8 MASAJ ALETİ

KULLANIM KLAVUZU

Cihazı Çalıştırmadan Önce Lütfen
Kullanma Klavuzunu Okuyun




Giriş:

G8 masaj aletleri genellikle profesyonel masaj terapistleri, fizyoterapistler ve sporcular arasında yaygın olarak kullanılan yüksek frekanslı titreşimli masaj aletleridir. Bu aletler genellikle kas gerginliğini azaltmak, dolaşımı artırmak ve kaslardaki ağrıları hafifletmek amacıyla kullanılır.


G8 masaj aleti, değiştirilebilir başlıklar ve farklı hız ayarları ile birlikte gelir. Bu başlıklar genellikle çeşitli dokulara ve kas gruplarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Yüksek frekanslı titreşim, kas dokusuna etkili bir şekilde nüfuz edebilir ve kasları rahatlatarak gevşemelerini sağlayabilir.

G8 masaj aletlerinin kullanımı özellikle sporcular arasında yaygındır çünkü antrenman sonrası kasların hızla toparlanmasına yardımcı olabilirler. Ancak, bu tür masaj aletlerini kullanmadan önce, özellikle ciddi sağlık sorunları veya belirli sağlık koşulları varsa bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Ayrıca, cihazın kullanım kılavuzunu dikkatlice okumak ve talimatlara uymak da önemlidir.

1.	Ekipman profesyonel bir güzellik ekipmanıdır, kalifiye profesyonel güzellik uzmanı tarafından çalıştırılmalıdır.
2.	Müşteriniz hazır olmadan cihazı çalıştırmayın. Masaj başlığı dışarı çıkabilir.
3.	Santrifüjlü titreşim başlığını kendi başınıza çıkarmayın.
4.	Ekipmanı veya tahrik milini yağlamayın. Mil ve tahrik mili sızdırmazdır ve otomatik olarak yağlanır.
5.	Ekipmanı ve yedek parçaları alkol veya deterjan yerine yumuşak sabun ve ılık suyla temizleyin.
6.	Ekipmanı iltihaplı, kanayan, yaralı veya yaralanmış bölgelerde kullanmayın.
7.	Ekipman, lenf hastalığı olarak tromboflebit geçiren kişilere kullanılmamalıdır.
8.	Ekipman, akciğer oksijen eksikliği veya tüberküloz geçiren kişilere uygulanamaz.
9.	Ekipman hamile kadınlara, adet dönemindeki kadınlara veya bebeklere uygulanmamalıdır.
10.	Cihaz motor tarafından çalıştırılır. Motorun içindeki başlık yüksek hızda çalışma nedeniyle hasar görecektir. Bu nedenle motorun yaklaşık 600 saat normal kullanımdan sonra yeni bir başlık la değiştirmesi gerekir. Normal şekilde kullanılmazsa, daha erken değiştirilmesi gerekebilir. Örneğin, tozlu ortamda uzun süre çalışma ve aşırı yüklenme vb. motorun çalışmasını durduracaktır. Motoru değiştirmek için şemaya bakın. İlk olarak, başlık kapağını tornavida ile vidalayın ve hasarlı başlığı çıkarın. İkinci olarak, yeni başlığı sabitleyin (başlık sabitleme yönüne dikkat edin). Başlık kapağını sıkıca vidalayın. Başlığın her iki tarafı da aynı anda değiştirilmelidir, aksi takdirde motor anormal çalışacaktır.

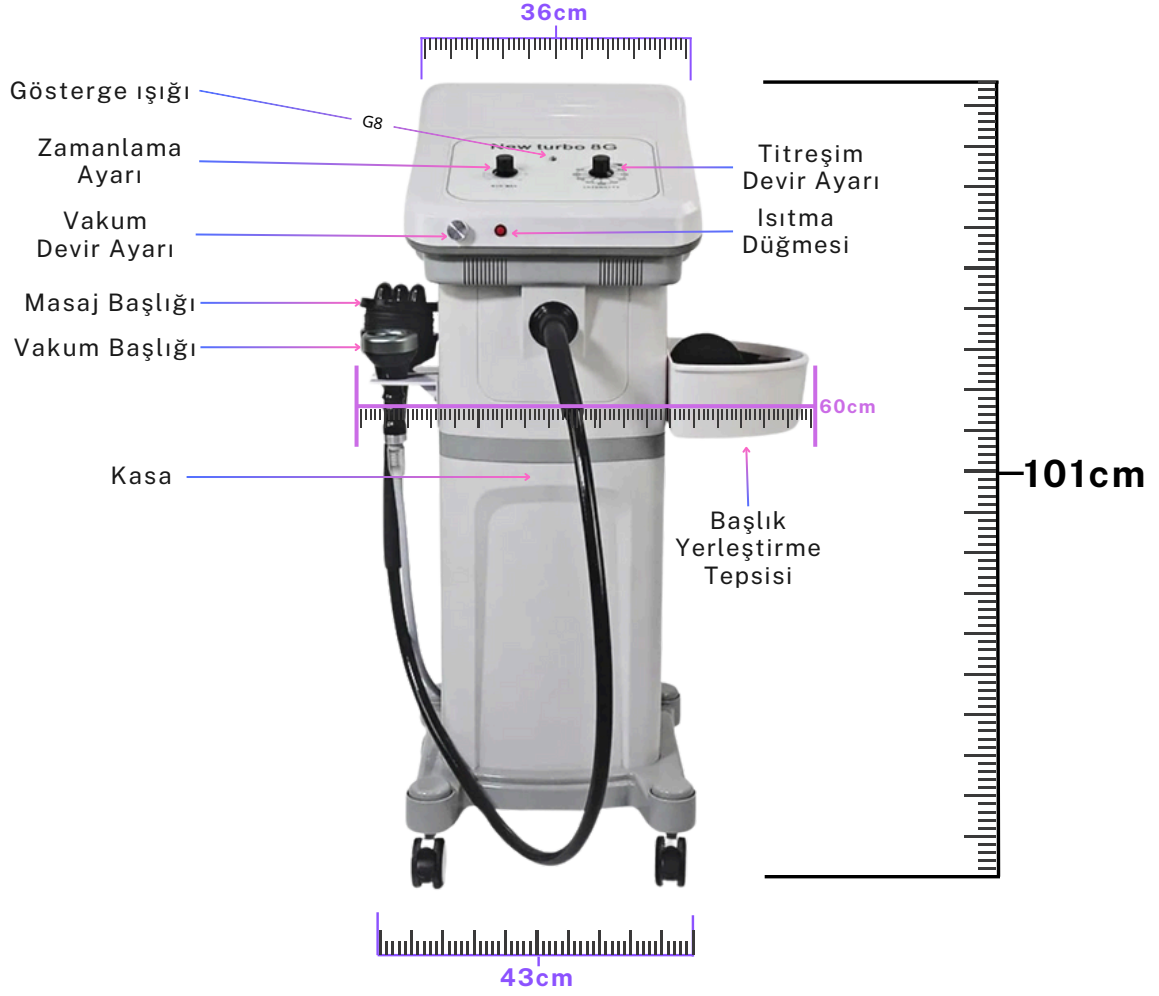

Masaj aleti kullanıcısı için çalıştırma talimatları

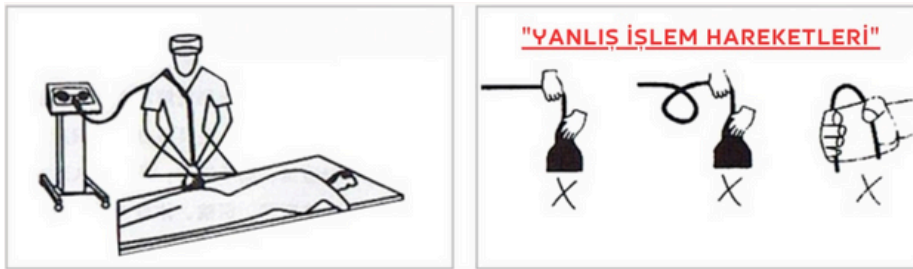

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazı doğru şekilde çalıştırmalıdır (resimlere göre)

Hortum 100 dereceden daha fazla katlanmamalı ve çalışma sırasında asla hortuma bastırılmamalıdır.

!"Yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar, Garanti kapsamı dışındadır



Masaj ve Vakum Başlığı Kesinlikle Su ile Yıkanmamalıdır.





Isıtmalı Vakum Probu	
1.	Ayarlanabilir emiş gücü daha iyi kollateralleri ve kan dolaşımını teşvik ederken, ısıtma vücut nemini etkili bir şekilde giderir.
2.	Çalıştırma talimatını ve notları dikkatlice okuyun ve ihtiyaca göre düşük ve yüksek titreşimin yanı sıra yavaş ve hızlı titreşimi çalıştırın.
3.	Parçalar çıkarılabilir, takılabilir ve değiştirilebilir.
4.	Büyük ve küçük yuvarlak köpük masaj başlıkları, baş ve vücut dahil olmak üzere her akupunktur noktasında kullanılmalıdır. Önerilen hız yaklaşık 800 rpm'dir (Çalışma sırasında tek kullanımlık film kılıfı kullanın).
5.	Yuvarlak kauçuk masaj başlığı, iç dolaşımı iyileştirmek için yumuşak rahatlatıcı masaj işlevine sahiptir. Mide bağırsak peristaltizmini ve boşaltımı hızlandırmak için göbük üzerinde kullanılır. (Çalışma sırasında tek kullanımlık film kılıfı kullanın)
6.	Pürüzlü ve kırışık cilde masaj yapmak için daire noktalı masaj başlığını kullanın, bu da kırışıklıkları giderebilir, cildi öğütebilir ve temizleyebilir. Ayrıca bu masaj başlığı, yüzey derisinin ve derin lifli dokunun yarasını iyileştirmek ve yara izlerini gidermek için uygulanabilir. önerilen hız 1600rpm-2400rpm'dir.
7.	Kas, sırt ve bele masaj yapmak ve yetersiz spor kaslarını uyarmak için yarım küre masaj başlığını kullanın. Masaj ve stimülasyon kasın yorulmasını ve sertleşmesini önler, eklem esnekliğini korur ve eklem ödemi azaltır. 2400rpm-3200rpm hız ile yağ kısmına yönelik titreşim, yağın yumuşatılması ve giderilmesinin yanı sıra kilo vermek için uygulanır.
8.	Sütunlu masaj başlığı, kasların uyarılmasında "masajcının parmakları" olarak adlandırılır. Masaj başlığı, sıkma ve titreşim yoluyla sert, burkulmuş veya yorgun kasların neden olduğu ağrıyı azaltmak için kullanılır. 2400 rpm-3200 rpm hız ile yağ kısmına yönelik titreşim, kilo vermek için yağları yumuşatmak ve uzaklaştırmak için uygulanır.
9.	Bükme başlığı, yönlü etki yapmak için çeşitli yedek parçalarla birlikte kullanılabilir. Hız 1600rpm-2400rpm'dir.
10.	Masajdan önce, müşterinin kaslarını gevşetmek için biraz egzersiz yapması veya saunaya girmesi iyi olur Masaj başlığının kolayca hareket etmesini sağlamak için biraz masaj yağı veya talk pudrası uygulayın Masajı başlatmak için pürüzsüz veya yumuşak masaj başlığını seçin ve yavaş hareket edin. Masaj başlığının hareketiyle uyumlu olması için kasları itmek için yedek elinizi kullanın.



Ürün Adı	DEFOND
Ürün modeli	G8
Serial No	EAG8202412
Net ağırlık	18 KG
Power	220V-240V 50-60HZ

***(G8)-(8G)-(NEW TURBO 8G)**
East Medikal 'in Tescilli
Markasıdır.

Not: Ürünlerimizin tasarım veya özellik
değişikliği için daha fazla bilgi almak
istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

YASAL GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL

GARANTİ KAPSAMINDA VEYA DIŞINDA DEĞİŞİMİ YAPILAN PARÇALARIN GARANTİ SÜRESİ 1 YILDIR.

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Garanti dahil şartlar ve koşullarımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemize bakın.

DEFOND

Üretici Firma :

Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.

2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,
Guangzhou, CHINA



İthalatçı Firma :

EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA

☎ 0850 255 42 42

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve Eastmedikal'nin bir taahhüdü olarak yorumlanmamalıdır. Eastmedikal., bu belgede görünebilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir ve ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili kısmi garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu materyalle ilgili olarak açık veya kısmi hiçbir garanti vermez. Eastmedikal., bu belgenin ve program materyalinin kullanımıyla bağlantılı veya kullanımından kaynaklanan tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

LÜTFEN BU BİLGİLERİ İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle
0850 255 42 42 telefondan iletişime geçin.

SATINALMA TARİHİ

FATURA NUMARASI

İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SATIN ALMA TARİHİNİZİ VE FATURA NUMARANIZI NOT EDİN

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :

ÜNVANI: EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD.

NO:11/C KARATAY/KONYA

Müşteri Hizmetleri : +90 (850) 255 42 42

Firma İmza ve Kaşesi :


EAST MEDİKAL
MEDICAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Fevziçakmak Mah. 10659. Sk. Yakamoz Cd. No:C11
Tel: 0533 693 25 42 Karatay/KONYA
Selçuk V.D 3231 205 560

Azami Tamir Süresi : 30 Gün

Garanti Süresi : 1 Yıl

Belge Numarası :

Belge Tarihi :

Markası : **Defond**

Modeli : **G58**

Cinsi : **G8 Masaj Aleti**

SATICI FİRMANIN :

Ünvanı :

Adresi :

Tel :

Fatura Tarihi ve Numarası :

Tarih :/...../202...

İmza :

KAŞE



GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, ürünlerin garanti süresi içinde bedelsiz olarak onarımı söz konusudur.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma, çizme, kimyasal, elektrokimyasal ve elektronik etkiler) kullanılan tesisattan kaynaklı hatalar,
2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşuları,
3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler),
4. **SU SIÇRAMALARI** Sonucu elektronik veya mekanik parçalara verdiği hasarlar,
5. Cihaz kullanırken veya ilk devreye alınana kadar emin olun orta koşullarının uygun olmamasından doğan sorunlar (toz, temizlik, kurum, kapak, su, nem, bakım eksikliği, vb.)
6. Kireç, çamur, çapak, demir ya da pisliklerinden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve hasarlar
7. Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar
8. Elektrik tesisatında sigorta kullanımı, elektrik tesisatında topraklamadan kaynaklanması sorunlar. Kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yüksek ya da alçak ihtiyaçtan kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.[2]
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1. Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
4. İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
5. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.