



ULTIMA-M8-W


KULLANIM KILAVUZU

KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN KILAVUZU OKUYUN



Ana gövde



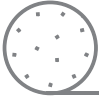

Nasıl kullanılır

Kablosuz Model: Dr pen M8-W

Cihaz hem dahili batarya hem de AC güç ile kullanılır

Kablolu Model: Dr pen M8-C

Cihaz sadece AC güç ile kullanılır


1. DC adaptörünü prize takın
2. DC adaptörünü elektrik prizine takın
3. Bataryayı şarj etmek için: Adaptörü bir prize takın ve elektrik adaptörüne bağlayın

Şarj Etme Durumu



Şarj sırasında güç göstergesi kırmızı kalır

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra güç göstergesi yeşile döner

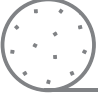

Nasıl kullanılır

Hazırlanması

- 1.İğne kartuşunu sterilize edilmiş ambalajından çıkarın.
- 2.Yuvarlak yuva 1'i makinenin 2'sine takarak, iğne kartuşunu yatay olarak sonuna kadar itin.
- 3.İğne kartuşunu saat yönünün tersine çevirerek kilitleyin.
- 4.İğne kartuşunu saat yönünde çevirin ve ardından çıkarmak istiyorsanız yatay olarak dışarı itin.



1.Dr.pen M8'i başlatın

Cihazı başlatmak veya kapatmak için güç düğmesine 2-3 saniye basın

Dikkat

Cihazı korumak amacıyla, sıvının geri akışını önlemek için cihazı ters çevirmeyin.



Nasıl kullanılır

İğne uzunluğunun ayarlanması

Ölçek ayar halkasını çevirerek iğne derinliğini ayarlayın

Saat yönünde çevirin, iğne derinliği daha kısa olacaktır

Saat yönünün tersine çevirin, iğne derinliği daha uzun olacaktır




Speed Display Hız Göstergesi



6 Hız Ayarı

Cihaz düşük hızdan yüksek hıza doğru çalışır Düğmeye her bastığınızda hız bir kademe değişir

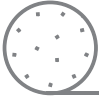

Teknik Özellikler

Marka: DEFOND

Model: ULTIMA-M8-W

Adaptör: 5V-1000mA

Paket Ağırlığı: 0,069KG

Paket Boyutu: 169*123*56 mm

Paket İçeriği

Ürün	Miktar
Cihaz	1 adet
Adaptör	1 adet
Elektrik Kablosu	1 adet
İğne Kartuşu	2 adet
Kullanım Kılavuzu	1 adet

Referans Tablosu

BÖLGE	İNCE CİLT	KALIN CİLT
Alın	0.25 -0.5mm	0.5 -0.75mm
Kaş Arası	0.25 -0.5mm	0.5-1.0mm
Burun	0.25mm	0.5mm
Göz Bölgesi	0.25mm	0.25 -0.5mm
Yanak Kemiği	0.5mm	0.5 -1.0mm
Kontrol ve Çene	0.5-1.0mm	1.0-2.0mm
Üst Dudak	0.25mm	0.25 -0.75mm
Yüz Yara İzi	1.0 -1.25mm	1.5-2.0mm
Çatlak İzi	1.5-2.0mm	1.5-2.0mm
Ameliyat ve Yanık İzleri	2.0-3.0mm	



Güvenlik Önlemleri

	Yeniden çalışması için üreticiye gönderin.
	Bunu aşağıdaki örnekte olduğu gibi insanlara uygulamayın! 1. Akut hastalığı veya 38 °C'nin üzerinde kanlı hastalığı olan 2. Alerjisi ve hemofilisi olan 3. Yüz melanozu olan kişiler 4. Yüksek iç ısıya sahip olan 5. Düzenli olarak hastane muayenesine gidenler 6. İlaç kullananlar 7. 12 yaşından küçük olanlar
	AC 220V dışındaki güçlerde kullanmayın. Yangınlara veya arızalara neden olabilir
	Yüksek sıcaklık, toz veya nemin olduğu yerlerin yakınında kullanmayın (Nemlendiricinin yakınında). Arızaya neden olabilir.
	Kontrol ünitesini ve gövdeyi onarmayın, sökmeyin veya değiştirmeyin. Arızaya neden olabilir.
	Islak ellerle cihaza dokunmayın veya güç kablolarını çıkarmayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Soyulmuş veya bükülmüş kablo kullanmayın. Yangına neden olabilir (yenisiyle değiştirdiğinizden emin olun).
	Çatlak veya yara izi olan destekli cord kullanmayın. Ciltte yaralara neden olabilir.
	Uzun süre kullanmayacağınız zaman fişini prizden çekin.
	Test için bir kontrol yaptırdığınızdan emin olun. Herhangi bir sorun bulunursa, tamir ettirin.
	Operatör dışında hiç kimse dokunamaz. Kazalara veya arızaya neden olabilir.

	Alternatif akım		Serial No
	Doğru akım		EU Representative
	Sınıf I ekipman		CE işareti
	Dikkat, ekteki belgelere bakın		Üretici firma
	Üretim tarihi		Kayan uygulamalı parça



Garanti Koşulları

Bu cihazın garanti süresi 1 yıldır. Ürünlerimizin satın alındıkları günden itibaren servis hizmeti vermekteyiz. Ürünlerimizden herhangi birinde hasar veya ürün kaynaklı sorun varsa. Onarım veya değişim sunuyoruz.

Genel Bakım

Kullanmadan önce cihazı ve adaptörü kontrol ettiğinizden emin olun

Gücü kapalıyken muhafaza edin. Yüzeyini kuru bir bezle silin.

Doğrudan güneş ışığından veya yüksek sıcaklık ve nemden uzak tutun

Cihazın ölçümünü, onarımını veya değiştirilmesini profesyonel olmayan personele yaptırmayın

Uzun süre kullanılmayan cihazı kullandığınızda, güvenlik açısından düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğinizden emin olun.

ULTİMA-M8-W

Üretici Firma :

Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.
2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,
Guangzhou, CHINA



İthalatçı Firma :

EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA

 0850 255 42 42

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :

ÜNVANI: EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD.
NO:11/C KARATAY/KONYA

Müşteri Hizmetleri : +90 (850) 255 42 42

Firma İmza ve Kaşesi :


EAST EAST MEDİKAL
FEBRİCİCİLLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Fevziçakmak Mah. 10669. Sk. Yakamoz Cd. No:11
Tel: 0533 893 25 42 Karatay/KONYA
Selçuk V.D 3231.205 560

Azami Tamir Süresi : 30 Gün

Garanti Süresi : 1 Yıl

Belge Numarası :

Belge Tarihi :

Markası : **Defond**

Modeli : **ULTIMA-MS-W**

Cinsi : Dermapen cihazı

SATICI FİRMANIN :

Ünvanı :

Adresi :

Tel :

Fatura Tarihi ve Numarası :

Tarih :/...../202...

İmza :

KAŞE



GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, ürünlerin garanti süresi içinde bedelsiz olarak onarımı söz konusudur.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma, çizme, kimyasal, elektrokimyasal ve elektronik etkiler) kullanılan tesisattan kaynaklı hatalar,
2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşuları,
3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler),
4. **SU SIÇRAMALARI** Sonucu elektronik veya mekanik parçalara verdiği hasarlar,
5. Cihaz kullanırken veya ilk devreye alınana kadar emin olun orta koşullarının uygun olmamasından doğan sorunlar (toz, temizlik, kurum, kapak, su, nem, bakım eksikliği, vb.)
6. Kireç, çamur, çapak, demir ya da pisliklerinden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve hasarlar
7. Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar
8. Elektrik tesisatında sigorta kullanımı, elektrik tesisatında topraklamadan kaynaklanması sorunlar. Kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yüksek ya da alçak ihtiyaçtan kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.[2] Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1. Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
4. İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
5. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.