

MODEL: JHM-08B


Yüksek Frekans Güzellik Cihazı

KULLANIMA KLAVUZU



MODEL: JHM-08B

ÜRÜN AÇIKLAMASI

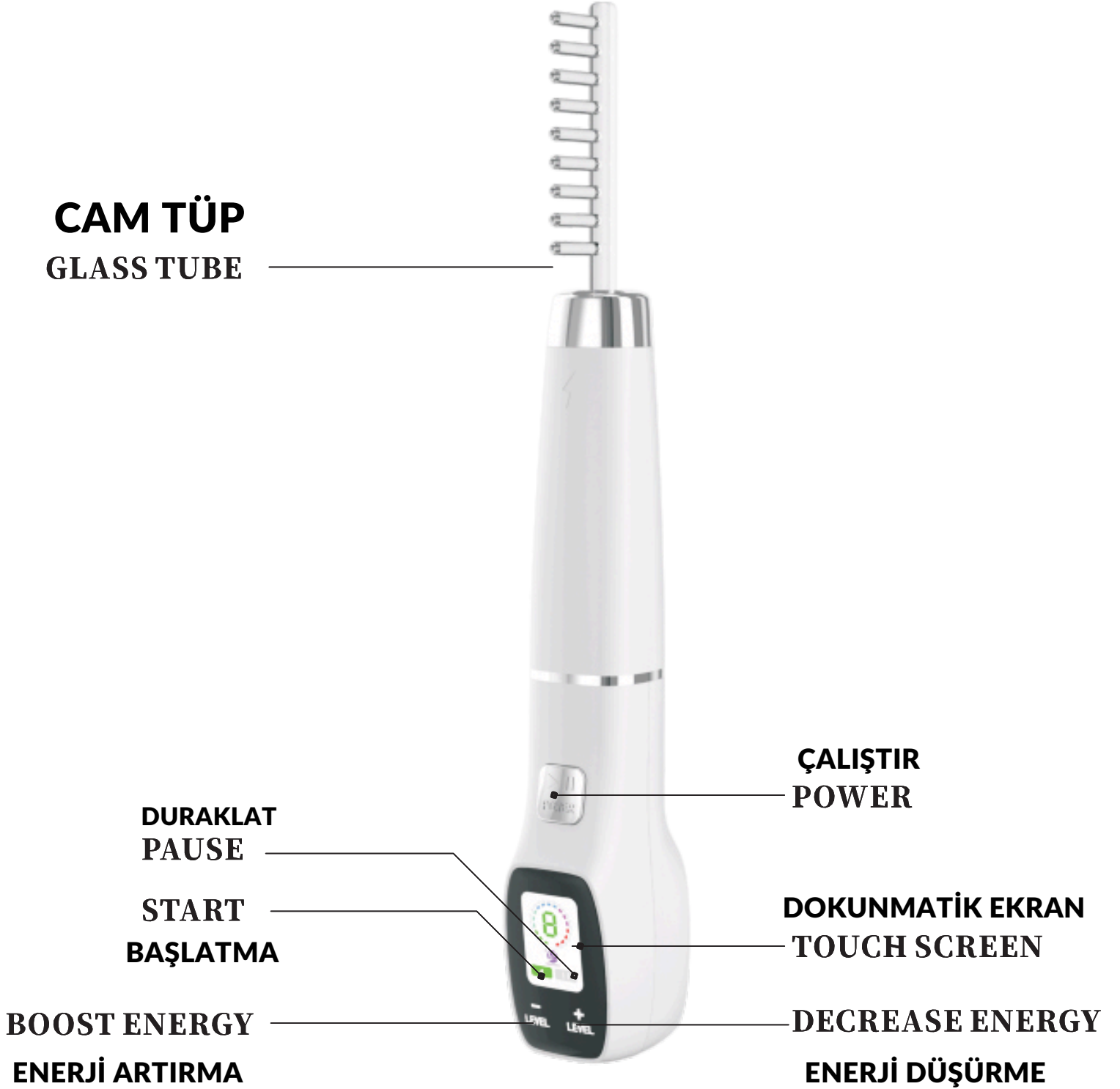

Other Accessories

DİĞER AKSESUARLAR



Tongue tube

DİL TÜPÜ



Bend tube

BÜKME TÜPÜ



Mushroom tube

MANTAR TÜPÜ



Y shape tube

Y ŞEKLİNDE TÜP



Comb tube

TARAK TÜPÜ



Roller Tube

(optional)

(İSTEĞE BAĞLI)

MAKARALI TÜP



Straight tube with tungsten

(optional)

(İSTEĞE BAĞLI)

TUNGSTEN İLE DÜZ TUBLE



Comb tube with tungsten

(optional)

(İSTEĞE BAĞLI)

TUNGSTENLİ TARAK TÜPÜ

4 parçalı set: bükme borusu + dil borusu mantar borusu + petek borusu

5 parçalı set: bükme tüpü+dil tüpü+mantar tüpü+petek tüpü+Y-şekilli tüp

6 parçalı set: bükme tüpü + dil tüpü mantar tüpü + tungstenli petek tüpü + Y şeklide tüp + tungstenli düz tüp

7 parçalı set: bükme tüpü + dil tüpü mantar tüpü + tungstenli petek tüpü + Y şekli tüpü + tungstenli düz tüp + Makaralı Tüp

Genel Bilgiler

Yüksek frekanslı elektroterapi önemli bir güzellik aracıdır.

Yüksek frekanslı akım üretmek için cam elektrot tüpü aracılığıyla yüze uygulanır ve böylece bakım sonucu elde edilir.

1. Sinirleri sakinleştirmeye yardımcı olur.
2. Sterilizasyon için ozon üretir, yaranın iyileşmesine ve gözeneklerin kısıtlanmasına yardımcı olabilir.
3. Salgıyı, PH değerini artırır, cildin nötraliteye yatmasına neden olur.
4. Kan dolaşımını hızlandırır ve metabolizmayı geliştirir.
5. Yaşlanma karşıtı, kırışıklık karşıtı ve sıkılaştırma işlevine sahiptir.

Çalışma Prosedürleri:

1. Dolaylı Yöntem:

(1). Lütfen cam tüpü el parçasına yerleştirin.

(2). Lütfen müşteriden biraz talk pudrasına dokunduktan sonra cam tüpü tutmasını isteyin. Makineyi açın ve elektrik ellerden tüm vücuda geçecektir.

(3). Güzellik uzmanları müşterinin yüzüne boyundan çeneye ve vizörden alına masaj yapar.

(4). Lütfen yoğunluğu "0" olarak ayarlayın. Makinenin kapalı olduğundan emin olun ve cam tüpü el parçasından çıkarın.

Bu yöntem kuru doğal ciltler ve yaşlı ciltler için uygundur.

2. Doğrudan Yöntem:

(1). Lütfen önce yüze esans ve krem sürün ve ardından güzellik uzmanı cam tüpü müşterinin yüzüne koymak için metal çubuğu tutun. Makineyi çalıştırın.

(2). Cam tp ile mterinin yzne "Z" veya sarmal gibi masaj yapın, uygulamayı aađıdaki gibi yapın, alın-burun-yzn sađ tarafı -ene-yzn sol tarafı~burun-ba

(3). Ltfen yođunluđu "0" olarak ayarlayın. Makinenin kapalı olduđundan emin olun ve cam tp el parasından ıkarın.

Bu yntem yađlı ciltler iin uygundur.

3. Iıltı Yntemi:

(1). Mterinin gzlerini ıslak bir bez parasıyla kapatın ve iltihaplanma kısmındaki cam tp ile yzne dokununuz. Bir kez iin, uygulama 10 saniyeden az olmalıdır.

(2) Cam tp yze dokunduđunda parıltılar ıkması normaldir.

(3) Ltfen yođunluđu "0" olarak ayarlayın. Makinenin kapalı olduđundan emin olun ve cam tp el parasından ıkarın.

Bu yntem ađrılı, iltihaplı ve yaralı ciltlere uygundur.

4. Sa Bakım Yntemi:

(1) Tarak tpn pilatory ile birlikte kullanın.

(2). Tarak tpn sa ynne dođru hareket ettirin.

(3). Ltfen yođunluđu "0" olarak ayarlayın. Makinenin kapalı olduđundan emin olun ve cam tp el parasından ıkarın.

Bu yntem, cilt yzeyini uyarmak, folikliti azaltmak ve saın sađlıklı bymesini iyiletirmek iindir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Pay attention

CAM TÜPÜN DOĞRU KULLANIMI

Correct usage of glass tube

Özel hatırlatma: Cam tüpü takarken veya çıkarırken cihazı kapatmalı veya yoğunluğu 0'a ayarlamalıdır.

Special reminder: It must turn it off or adjust the intensity to 0 when plugging or unplugging the glass tube.



YANLIŞ YÖNTEM



DOĞRU YÖNTEM

Bu ürünü satın aldığınız ve kullandığınız için teşekkür ederiz

Thank you for purchasing and using this product

if the instrument needs to be transferred to others,
Please transfer it with the manual



BRAND NAME : DEFOND

MODEL : JHM-08B

Gross Weight : 0.42 KG

Year of Built :2024

Power: 100V-240V-50/60HZ

Serial No :4734590123D4

**Manufacture :GUANGZHOU DEFOND ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD
Room 1020, Building C, No.569, Huangbian North Road, Baiyun District,
Guangzhou, CHINA**

IMPORT: EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fevziçakmak Mah, Yakamoz Cd. NO:11/C 42050 Karatay / KONYA

Phone Nummer: 0850 255 42 42



Üretici Firma :

Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.

2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,
Guangzhou, CHINA

İthalatçı Firma :

EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA



GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :

ÜNİVANİ: EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD.

NO:11/C KARATAY/KONYA

Müşteri Hizmetleri : +90 (850) 255 42 42

Firma İmza ve Kaşesi :

 **EAST MEDİKAL**
MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Fevziçakmak Mah. 10659. Sk. Yakamoz Cd. No:C11
Tel: 0850 255 42 42 Karatay/KONYA
Selçuk V.D 3231 205 560

Azami Tamir Süresi : 30 Gün

Garanti Süresi : 1 Yıl

Belge Numarası : Fatura no baz Alınır

Belge Tarihi : Fatura Tarihi baz Alınır

Markası : Defond

Modeli : JHM-08B

Cinsi : Yüksek Frekans



GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, ürünlerin garanti süresi içinde bedelsiz olarak onarımı söz konusudur.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma, çizme, kimyasal, elektrokimyasal ve elektronik etkiler) kullanılan tesisattan kaynaklı hatalar,
2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşulları,
3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler),
4. **SU SIÇRAMALARI** Sonucu elektronik veya mekanik parçalara verdiği hasarlar,
5. Cihaz kullanırken veya ilk devreye alınana kadar emin olun orta koşullarının uygun olmamasından doğan sorunlar (toz, temizlik, kurum, kapak, su, nem, bakım eksikliği, vb.)
6. Kireç, çamur, çapak, demir ya da pisliklerinden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve hasarlar
7. Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar
8. Elektrik tesisatında sigorta kullanımı, elektrik tesisatında topraklamadan kaynaklanması sorunlar. Kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yüksek ya da alçak ihtiyaçtan kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.[2]
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1. Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
4. İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
5. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.