



ULTIMA-E30

KULLANIM KILAVUZU

LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE KILAVUZU OKUYUN



Parçaların Adı





Nasıl çalıştırılır

Kablosuz Model: Dr pen E30-W

Cihaz hem dahili pille hem de elektrikle kullanılır

Kablolu Model: Dr pen E30-C

Sadece elektrikli olarak kullanılan cihaz

1. DC adaptörünü prize takın
2. DC adaptörünü AC prizine takın
3. Pili şarj etmek için: Adaptörü bir prize takın ve güç arabirimine bağlayın

Şarj Olma Durumu



● Şarj sırasında güç göstergesi kırmızı yanar


● Şarj işlemi tamamlandıktan sonra güç göstergesi yeşile döner



Nasıl alıřtırılır

Hazırlık

1. Sterilize edilmiř ambalaj iindeki iğne kartuřunu ıkarın
2. Yuvarlak yuva 1'i makinenin 2'sine takarak, iğne kartuřunu yatay olarak sonuna kadar itin.
3. İğne kartuřunu saat yönünün tersine evirerek kilitleyin.
4. İğne kartuřunu saat yönünde evirin ve ardından ıkarmak istiyorsanız yatay olarak dıřarı itin.

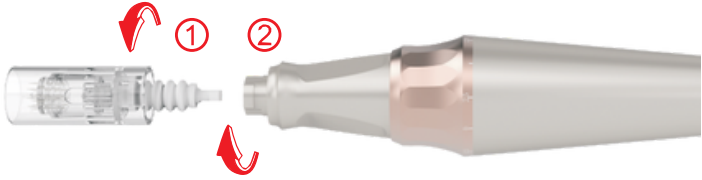

5. Cihazı alıřtırın

Cihazı bařlatmak veya kapatmak iin güç düğmesine 2-3 saniye basın.

Dikkat

Cihazı iyi korumak iin, sıvının geri akıřını önlemek amacıyla cihazı ters evirmeyin



Nasıl alıřtırılır

İğne uzunluęunun ayarlanması


Ölek ayar halkasını evirerek ięne uzunluęunu ayarlayın

Saat yönünde evirin, ięne uzunluęu kısılacaktır.
Saat yönünün tersine evirin, ięne uzunluęu daha uzun olacaktır



5 Hız Ayarı

Kalem düşük hızdan yüksek hıza geer
Düęmeye her bastığınızda hız bir kez deęiřir

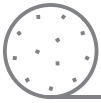

İğne kartuşlarının tanıtımı



L1



R3-M



R5



F3



F5



F7



F9



9



12



24



36



42



Nano



Nano



3DNano



SNano



Teknik Özellikler

Marka: DEFOND

Model: ULTIMA-E30

Adaptör: 5V-1000mA

Paket Ağırlığı: 318g

Paket Boyutu: 169*123*56mm

Paket İçeriği

Parça	Miktar
El Parçası	1 adet
Adaptör	1 adet
Kullanım Kılavuzu	1 adet
Güç Kablosu	1 adet
İğne Kartuşu	2 adet



Güvenlik Önlemleri

	Yeniden çalışılması için üreticiye gönderin.
	Bunu aşağıdaki örnekte olduğu gibi insanlara uygulamayın! 1. Akut hastalığı veya 38 °C'nin üzerinde kanlı hastalığı olan 2. Alerjisi ve hemofilisi olan 3. Yüz melanozu olan kişiler 4. Yüksek iç ısıya sahip olan 5. Düzenli olarak hastane muayenesine gidenler 6. İlaç kullananlar 7. 12 yaşından küçük olanlar
	AC 220V dışındaki güçlerde kullanmayın. Yangınlara veya arızalara neden olabilir
	Yüksek sıcaklık, toz veya nemin olduğu yerlerin yakınında kullanmayın (Nemlendiricinin yakınında). Arızaya neden olabilir.
	Kontrol ünitesini ve gövdeyi onarmayın, sökmeyin veya değiştirmeyin. Arızaya neden olabilir.
	Islak ellerle cihaza dokunmayın veya güç kablolarını çıkarmayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Soyulmuş veya bükülmüş kablo kullanmayın. Yangına neden olabilir (yenisiyle değiştirdiğinizden emin olun).
	Çatlak veya yara izi olan destekli cord kullanmayın. Ciltte yaralara neden olabilir.
	Uzun süre kullanmayacağınız zaman fişini prizden çekin.
	Test için bir kontrol yaptırduğunuzdan emin olun. Herhangi bir sorun bulunursa, tamir ettirin.
	Operatör dışında hiç kimse dokunamaz. Kazalara veya arızaya neden olabilir.

	Alternatif akım		Serial No
	Doğru akım		EU Representative
	Sınıf I ekipman		CE işareti
	Dikkat, ekteki belgelere bakın		Üretici firma
	Üretim tarihi		Kayan uygulamalı parça



Garanti Koşulları

Bu cihazın garanti süresi 1 yıldır. Ürünlerimizin satın alındıkları günden itibaren tamirini yapmaktayız. Ürünlerimizden herhangi birinde hasar veya ürün kaynaklı sorun varsa. Onarım veya değişim sunuyoruz.

Genel Bakım

Kullanmadan önce cihazı ve adaptörü kontrol ettiğinizden emin olun

Gücü kapalıyken saklayın. Yüzeyini kuru bir bezle silin.

Doğrudan güneş ışığından veya yüksek sıcaklık ve nemden uzak tutun

Cihazın ölçümünü, onarımını veya değiştirilmesini profesyonel olmayan personele yaptırmayın

Uzun süre kullanılmayan cihazı kullandığınızda, güvenlik açısından düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğinizden emin olun.

Dr.pen E30

Üretici Firma :

Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.
2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,
Guangzhou, CHINA



İthalatçı Firma :

EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA

 0850 255 42 42

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :

ÜNVANI: EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD.
NO:11/C KARATAY/KONYA

Müşteri Hizmetleri : +90 (850) 255 42 42

Firma İmza ve Kaşesi :


EAST EAST MEDİKAL
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Fevziçakmak Mah. 10659. Sk. YakamoZ Cd. No:11
Tel: 0533 893 25 42 Karatay/KONYA
Selçuk V.D 3231 205 560

Azami Tamir Süresi : 30 Gün

Garanti Süresi : 1 Yıl

Belge Numarası :

Belge Tarihi :

Markası : **Defond**

Modeli : **Dr.pen E30**

Cinsi : Dermapen cihazı

SATICI FİRMANIN :

Ünvanı :

Adresi :

Tel :

Fatura Tarihi ve Numarası :

Tarih :/...../202...

İmza :

KAŞE


EAST
MEDICAL

GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, ürünlerin garanti süresi içinde bedelsiz olarak onarımı söz konusudur.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma, çizme, kimyasal, elektrokimyasal ve elektronik etkiler) kullanılan tesisattan kaynaklı hatalar,
2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşuları,
3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler),
4. **SU SIÇRAMALARI** Sonucu elektronik veya mekanik parçalara verdiği hasarlar,
5. Cihaz kullanırken veya ilk devreye alınana kadar emin olun orta koşullarının uygun olmamasından doğan sorunlar (toz, temizlik, kurum, kapak, su, nem, bakım eksikliği, vb.)
6. Kireç, çamur, çapak, demir ya da pisliklerinden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve hasarlar
7. Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar
8. Elektrik tesisatında sigorta kullanımı, elektrik tesisatında topraklamadan kaynaklanması sorunlar. Kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yüksek ya da alçak ihtiyaçtan kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.[2]
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1. Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
4. İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
5. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.