

# AYAKLI HAVA SIKILAŐTIRICI

## KULLANIM KILAVUZU



Sayın MüŐterimiz,  
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.  
Daha iyi kullanım ve güvenlik için, lütfen herhangi bir işlem yapmadan önce  
bu kılavuzu okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Tanım : Vertical pressotherapy machine

Model : RU-1605B

## Çalışma prensibi


Bir dizi kumaş benzeri aksesuara ve 16 adet hava yastığına sahip, döngüler halinde veya hep birlikte basınç uygulanmasına olanak tanıyan pressoterapi vücut zayıflama makinesi hem tüm vücut hem de vücudun belirli bölümleri için, venöz ve lenfatik akışı artırmak ve hücre dışı sıvı temizliğini artırmak için tasarlanmış bir kompresyon sistemidir.

Vücudun doğal toksin temizleme işlevlerinin desteklenmesine yardımcı olabilir. Dokunun canlandırılması ve oksijenlenmesi, cilt tonunu iyileştirirken bacakların, midenin ve kolların incelmeye ve yeniden tanımlanmasına yardımcı olur.

Liposuction'a güvenli bir alternatif olan selülit tedavisinde şiddetle tavsiye edilir. Ağrıyı ve şişliği giderir, anında rahatlık sağlar. Cilt tonunu iyileştirirken bacakları, karnı ve kolları yeniden tanımlar. İşlev:

- 1) Detoksifikasyon
- 2) Vücut şekilleri; Ton vücut kasları.
- 3) Vücut zayıflaması;
- 4) Lenfatik fizik tedavi;
- 5) Gevşeme;
- 6) Selülitlerin azaltılması.

Hava yastığı: (16 adet)

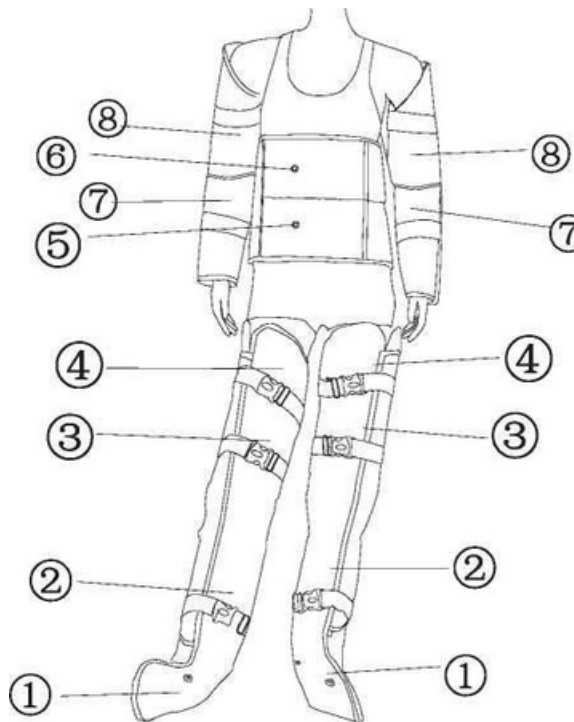

## Kontrol Paneli: 1



1. Çalışma süresi

2. Çalışma yoğunluğu (S-M-L)

Seçiminiz için 3 farklı hava basıncı gücü seviyesi

3. Çalışma programı (1-2-3-4)

Soldan sağa doğru:

İlk üç mod otomatik moddur ve dördüncü mod manuel moddur :

(1) Hava akışı: ayak - bacaklar - bel-kollar. İlk hava yastığını ve ardından bir sonrakini şişirin ve bırakın.


(2) Hava akışı: ayak - bacaklar - bel - kollar. İlk hava yastığını ve ardından bir sonrakini şişirin ve bırakın. 3 kez yaptıktan sonra tüm hava yastıklarını birlikte şişirin.

(3) Hava akışı: ayak - bacaklar - bel - kollar. İlk hava yastığı, bir sonrakini şişirirken hava basıncını serbest bırakmaz, bu nedenle tüm hava yastıkları bittiğinde şişmeye devam eder.

(4) Panelde gösterildiği gibi herhangi bir hava yastığını seçebilirsiniz.

4. Çalışma alanı (Ayak-bacaklar-bel-kollar)

Gösterge ışığından hangi alanın çalışmakta olduğunu gösterir

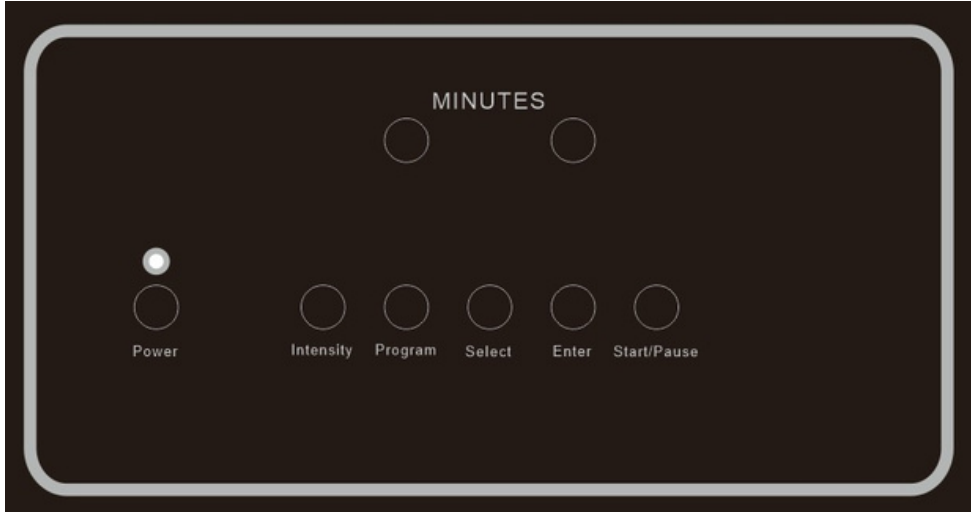

Dakika: Çalışma süresini artırın veya azaltın

Güç: Makineyi açın veya kapatın

Yoğunluk: Farklı çalışma yoğunluğu seçin (S-M-L)

Program: Farklı bir program seçin (1-2-3-4)

Seçiniz: Programı seçerken farklı çalışma alanı seçmek için bu düğmeyi kullanın 4

Girin: Programı seçerken farklı çalışma alanına girmek için bu düğmeyi kullanın 4

Başlat/Duraklat: Başlat veya duraklat

## Parça bağlantıları:



A'yı makinenin A çıkışına, B'yi B çıkışına bağlayın.

Tüpleri, tüp ve battaniye ve bez üzerindeki 1-8 numaralarına göre beze bağlayın.

### Çalıştırma:

1. Giysileri giyin ve hava yastıklarını iyi durumda bağlayın.
2. Gücü açın, gösterge yanacaktır.
3. Her işlem için yoğunluğu, zamanı ve Modu seçin.

İşte önerilen ayarlar:

- Yağ: 1 program seçin, standart süre 60 dakikadır ve yoğunluk için L'yi seçin.
  - Orta yağlı vücut: 1 veya 2 program seçin, standart süre 30-45 dakikadır ve yoğunluk için L veya M'yi seçin.
  - Biraz yağlı vücut: Orta yağlı vücut, 2 programı seçin, standart süre 30-45 dakikadır ve yoğunluk için M veya S'yi seçin.
  - Ağırılığı koruyun: manuel programı seçin ve müşterinin formunu korumak için ihtiyaç duyduğu 5 hava yastığını seçin ve standart süre 20 ~ 30 dakikadır.
  - Lenfatik: 3 program seçin, standart süre 20~35 dakikadır.
4. İşlemi başlatmak için "Başlat/Duraklat" düğmesine basın

---

**Dikkat Edilmesi Gerekenler:**

1. Müşteri işlemiden önce tüm takılarını çıkarmalıdır.
2. Vücudunda metal bulunan müşterilerin ve hamile kadınların bu makineyi kullanması önerilmez.
3. Bir günlük kullanımdan sonra makineyi kapatın ve fişini çekin. Makineyi silmek için sadece kuru bez kullanın.

**Tanım : Vertical pressotherapy machine**

**Model : RU-1605B**

**Üretici Firma :**

**CYNTHIA**

Manufacturer: Guangzhou Cynthia Beauty Equipment Co.,Ltd/ 3  
Floor, 3 Building, Shunxiang Industrial Zone, Jiahe Street, Baiyun

**İthalatçı Firma :**

**EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.**

Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi  
42050 Karatay KONYA

 0850 255 42 42