

G8 PRO MASAJ ALETİ

KULLANIM KLAVUZU

Cihazı Çalıştırmadan Önce Lütfen
Kullanma Klavuzunu Okuyun



Giriş:

G8 masaj aletleri genellikle profesyonel masaj terapistleri, arasında yaygın olarak kullanılan yüksek titreşimli masaj aletleridir.

G8 masaj aleti, değiştirilebilir başlıklar ve farklı hız ayarları ile birlikte gelir. Bu başlıklar genellikle çeşitli dokulara ve kas gruplarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Titreşim, kas dokusuna etkili bir şekilde nüfuz edebilir ve kasları rahatlatarak gevşemelerini sağlayabilir.




CİHAZIN BAŞLIGINI KESİNLİKLE SU İLE YIKAMAYAYIN.


Cihaz başlığı su ile temas ettiğinde Garanti kapsamı dışındadır



1.	Ekipman profesyonel bir güzellik ekipmanıdır, kalifiye profesyonel güzellik uzmanı tarafından çalıştırılmalıdır.
2.	Müşteriniz hazır olmadan cihazı çalıştırmayın. Masaj başlığı dışarı çıkabilir.
3.	Titreşim başlığını kendi başınıza çıkarmayın.
4.	Ekipmanı veya tahrik milini yağlamayın. Mil ve tahrik mili sızdırmazdır ve otomatik olarak yağlanır.
5.	Ekipmanı ve yedek parçaları alkol veya deterjan yerine yumuşak sabun ve ılık suyla temizleyin.
6.	Ekipmanı iltihaplı, kanayan, yaralı veya yaralanmış bölgelerde kullanmayın.
7.	Ekipman, lenf hastalığı olarak tromboflebit geçiren kişilere kullanılmamalıdır.
8.	Ekipman, akciğer oksijen eksikliği veya tüberküloz geçiren kişilere uygulanamaz.
9.	Ekipman hamile kadınlara, adet dönemindeki kadınlara veya bebeklere uygulanmamalıdır.
10.	Cihaz motor tarafından çalıştırılır. Motorun içindeki başlık yüksek hızda çalışma nedeniyle hasar görecektir. Bu nedenle motorun yaklaşık 600 saat normal kullanımdan sonra yeni bir başlık la değiştirmesi gerekir. Normal şekilde kullanılmazsa, daha erken değiştirilmesi gerekebilir. Örneğin, tozlu ortamda uzun süre çalışma ve aşırı yüklenme vb. motorun çalışmasını durduracaktır. Motoru değiştirmek için şemaya bakın. İlk olarak, başlık kapağını tornavida ile vidalayın ve hasarlı başlığı çıkarın. İkinci olarak, yeni başlığı sabitleyin (başlık sabitleme yönüne dikkat edin). Başlık kapağını sıkıca vidalayın. Başlığın her iki tarafı da aynı anda değiştirilmelidir, aksi takdirde motor anormal çalışacaktır.

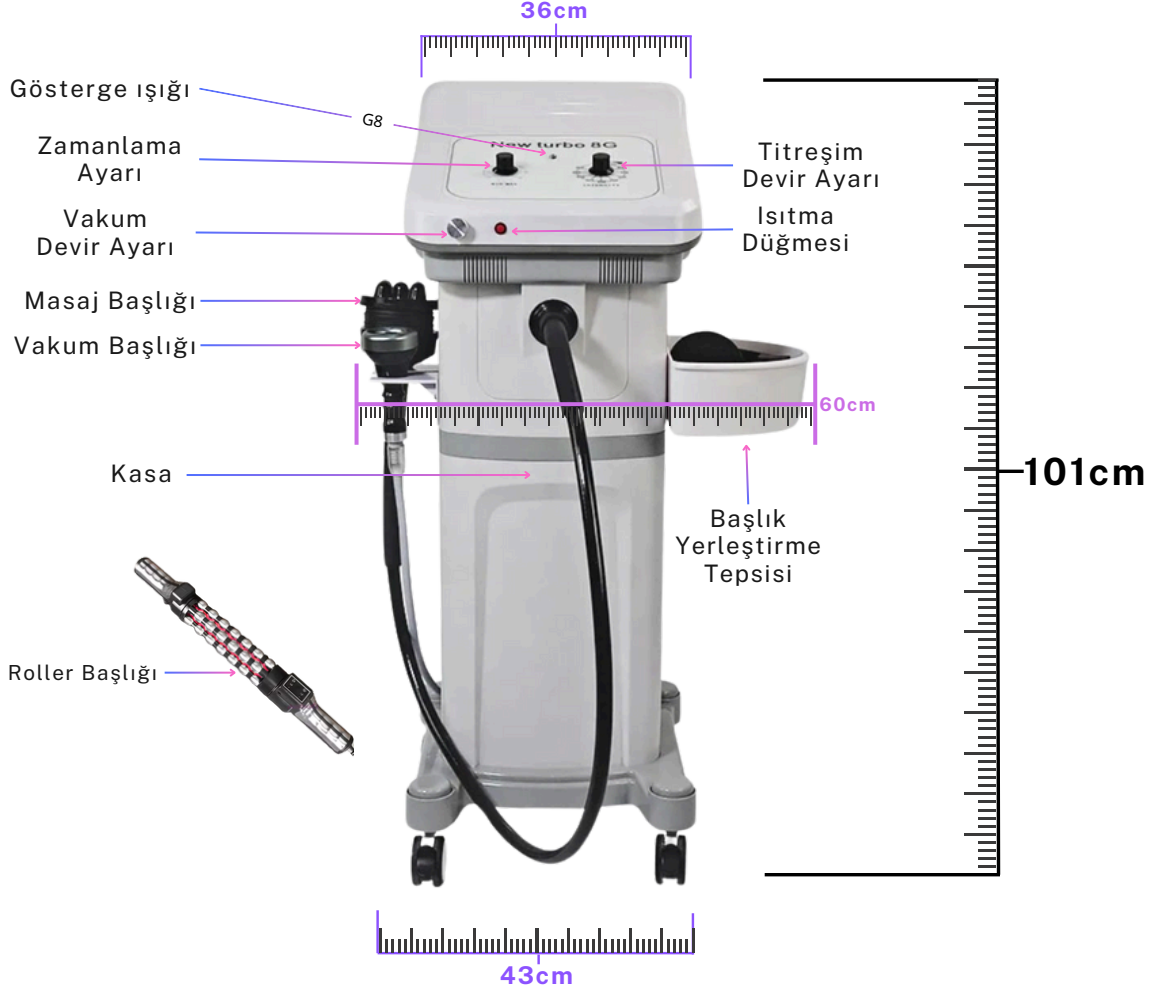

Masaj aleti kullanıcısı için çalıştırma talimatları

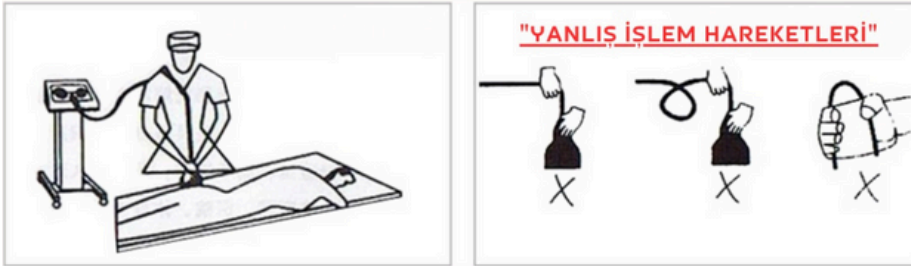

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazı doğru şekilde çalıştırmalıdır (resimlere göre)

Hortum 100 dereceden daha fazla katlanmamalı ve çalışma sırasında asla hortuma bastırılmamalıdır.

!"Yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar, Garanti kapsamı dışındadır



Masaj ve Vakum Başlığı Kesinlikle Su ile Yıkanmamalıdır.





Isıtmalı Vakum Probu	
1.	Ayarlanabilir emiş gücü daha iyi kollateralleri ve dolaşımını teşvik ederken, ısıtma vücut nemini etkili bir şekilde giderir.
2.	Çalıştırma talimatını ve notları dikkatlice okuyun ve ihtiyaca göre düşük ve yüksek titreşimin yanı sıra yavaş ve hızlı titreşimi çalıştırın.
3.	Parçalar çıkarılabilir, takılabilir ve değiştirilebilir.
4.	Büyük ve küçük yuvarlak köpük masaj başlıkları, baş ve vücut dahil olmak üzere her akupunktur noktasında kullanılmalıdır. Önerilen hız yaklaşık 800 rpm'dir (Çalışma sırasında tek kullanımlık film kılıfı kullanın).
5.	Yuvarlak kauçuk masaj başlığı, iç dolaşımı iyileştirmek için yumuşak rahatlatıcı masaj işlevine sahiptir. Mide bağırsak peristaltizmini ve boşaltımı hızlandırmak için göbük üzerinde kullanılır. (Çalışma sırasında tek kullanımlık film kılıfı kullanın)
6.	Pürüzlü ve kırışık cilde masaj yapmak için daire noktalı masaj başlığını kullanın, bu da kırışıklıkları giderebilir, cildi öğütebilir ve temizleyebilir. Ayrıca bu masaj başlığı, yüzey derisinin ve derin lifli dokunun yarasını iyileştirmek ve yara izlerini gidermek için uygulanabilir. önerilen hız 1600rpm-2400rpm'dir.
7.	Kas, sırt ve bele masaj yapmak ve yetersiz spor kaslarını uyarmak için yarım küre masaj başlığını kullanın. Masaj ve stimülasyon kasın yorulmasını ve sertleşmesini önler, eklem esnekliğini korur ve eklem ödemi azaltır. 2400rpm-3200rpm hız ile yağ kısmına yönelik titreşim, yağın yumuşatılması ve giderilmesinin yanı sıra kilo vermek için uygulanır.
8.	Sütunlu masaj başlığı, kasların uyarılmasında "masajcının parmakları" olarak adlandırılır. Masaj başlığı, sıkma ve titreşim yoluyla sert, burkulmuş veya yorgun kasların neden olduğu ağrıyı azaltmak için kullanılır. 2400 rpm-3200 rpm hız ile yağ kısmına yönelik titreşim, kilo vermek için yağları yumuşatmak ve uzaklaştırmak için uygulanır.
9.	Bükme başlığı, yönlü etki yapmak için çeşitli yedek parçalarla birlikte kullanılabilir. Hız 1600rpm-2400rpm'dir.
10.	Masajdan önce, müşterinin kaslarını gevşetmek için biraz egzersiz yapması veya saunaya girmesi iyi olur Masaj başlığının kolayca hareket etmesini sağlamak için biraz masaj yağı veya talk pudrası uygulayın Masajı başlatmak için pürüzsüz veya yumuşak masaj başlığını seçin ve yavaş hareket edin. Masaj başlığının hareketiyle uyumlu olması için kasları itmek için yedek elinizi kullanın.



Ürün Adı	DEFOND
Ürün modeli	G8
Serial No	EAG8202412
Net ağırlık	18 KG
Power	220V-240V 50-60HZ

***(G8)-(8G)-(NEW TURBO 8G)**
East Medikal 'in Tescilli
Markasıdır.

Not: Ürünlerimizin tasarım veya özellik
değişikliği için daha fazla bilgi almak
istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

YASAL GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL

GARANTİ KAPSAMINDA VEYA DIŞINDA DEĞİŞİMİ YAPILAN PARÇALARIN GARANTİ SÜRESİ 1 YILDIR.

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Garanti dahil şartlar ve koşullarımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemize bakın.

DEFOND

Üretici Firma :

Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.

2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,
Guangzhou, CHINA



İthalatçı Firma :

EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA

☎ 0850 255 42 42

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve Eastmedikal'nin bir taahhüdü olarak yorumlanmamalıdır. Eastmedikal., bu belgede görünebilecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir ve ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili kısmi garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu materyalle ilgili olarak açık veya kısmi hiçbir garanti vermez. Eastmedikal., bu belgenin ve program materyalinin kullanımıyla bağlantılı veya kullanımından kaynaklanan tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

LÜTFEN BU BİLGİLERİ İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle
0850 255 42 42 telefondan iletişime geçin.

SATINALMA TARİHİ

FATURA NUMARASI

İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SATIN ALMA TARİHİNİZİ VE FATURA NUMARANIZI NOT EDİN

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :

ÜNİVANİ: EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD.

NO:11/C KARATAY/KONYA

Müşteri Hizmetleri : +90 (850) 255 42 42

Firma İmza ve Kaşesi :

 **EAST MEDİKAL**
MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Fevziçakmak Mah. 10659. Sk. Yakamoz Cd. No:C11
Tel: 0850 255 42 42 Karatay/KONYA
Selçuk V.D 3231 205 560

Azami Tamir Süresi : 30 Gün

Garanti Süresi : 1 Yıl

Belge Numarası : Fatura no baz Alınır

Belge Tarihi : Fatura Tarihi baz Alınır

Markası : G8

Modeli : G8 Pro

Cinsi : G8 Masaj Aleti



GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, ürünlerin garanti süresi içinde bedelsiz olarak onarımı söz konusudur.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma, çizme, kimyasal, elektrokimyasal ve elektronik etkiler) kullanılan tesisattan kaynaklı hatalar,
2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşuları,
3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler),
4. **SU SIÇRAMALARI** Sonucu elektronik veya mekanik parçalara verdiği hasarlar,
5. Cihaz kullanırken veya ilk devreye alınana kadar emin olun orta koşullarının uygun olmamasından doğan sorunlar (toz, temizlik, kurum, kapak, su, nem, bakım eksikliği, vb.)
6. Kireç, çamur, çapak, demir ya da pisliklerinden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve hasarlar
7. Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar
8. Elektrik tesisatında sigorta kullanımı, elektrik tesisatında topraklamadan kaynaklanması sorunlar. Kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yüksek ya da alçak ihtiyaçtan kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.[2]
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1. Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
4. İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
5. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.



Certificate of Conformity

EU-LOW VOLTAGE DIRECTIVE- 2014/35/EU

Registration No.: ENC2308241GZ18-2

Applicant : Guangzhou Defond Electronic Technology Co., Ltd.

Applicant Address : 2nd Floor, Building C, No. 569, Huangbian North Road, Baiyun District, Guangzhou, China

Product Designation : Massage machine

Model Number : G5/G8/GL-01/GL-02/GL-03/GL-04/GL-05/GL-06/GL-07/GL-08/GL-09/GL-10

Brand Name : Defond

Manufacturer : Guangzhou Defond Electronic Technology Co., Ltd.

Manufacturer Address : 2nd Floor, Building C, No. 569, Huangbian North Road, Baiyun District, Guangzhou, China

The submitted products have been tested by us with the listed standard and found in compliance with the following European Standards:

Directive	Applied Standards	Test Report No.
LVD Directive 2014/35/EU	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021	ENC2308241GZ18L1
	EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A2:2015	
	EN 62233:2008	

This certificate is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical report and documentation are at the licence applicant's disposal. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product. The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.




 Ray Zhou / General Manager
 Date of Issue: Aug. 30, 2023

East Notice Certification Service Co., Ltd.

1/F, Haohui Commercial Building, Zhuji Street, Dongpu Town, Tianhe District, Guangzhou City, China

E-mail: enc@enc-lab.com
Web: www.enc-lab.com