




ULTİMA-A6S

KULLANICI KILAVUZU

**KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN KILAVUZU
OKUYUN**

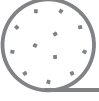

Ana gövde



Hız Görüntüleme Ekranı

Güç/Hız Düğmesi

Ölçek Ayar Halkası

İğne Kartuşu



Parçalar



- ① Batarya ② Kablolu konektör ③ Şarj cihazı

Kablosuz Mod

Şarj edilebilir batarya ile çalışan cihaz

Kablolu Mod


Elektrik ile çalışan cihaz



Şarj Etme Durumu

Şarj olurken güç göstergesi kırmızı yanar

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra güç göstergesi yeşile döner

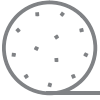

Nasıl alıřtırılır

Hazırlık Ařaması


1. Sterilize edilmiř ambalaj iindeki ięne kartuřunu ıkarın
2. Yuvarlak yuva 1'i makinenin 2'sine takarak, ięne kartuřunu yatay olarak sonuna kadar itin.
3. İęne kartuřunu saat yönünün tersine evirerek kilitleyin
4. İęne kartuřunu saat yönünde evirin ve ardından ıkarmak istiyorsanız yatay olarak dıřarı itin.



5. Dr.pen A6S'yi bařlatın
Cihazı bařlatmak veya kapatmak iin gü düęmesine 2-3 saniye basın.

Dikkat

Cihazı iyi korumak iin, sıvının geri akıřını önlemek amacıyla cihazı ters evirmeyin

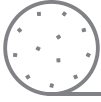

Nasıl alıřtırılır

İğne uzunluęunun ayarlanması

Ölçek ayar halkasını çevirerek ięne derinlięini ayarlayın

Saat yönünde çevirin, ięne derinlięi daha kısa olacaktır
Saat yönünün tersine çevirin, ięne derinlięi daha uzun olacaktır




Speed Display



Hız Ayarı

Cihaz alıřtırıldıktan sonraki hız, kapatılmadan önceki hız ile aynıdır

Düęmeye her bastıęınızda hız bir kez deęiřir

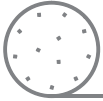

İğne kartuşunun tanıtımı



11 Pin İğne



16 Pin İğne



24 Pin İğne



36 Pin İğne



42 Pin İğne



R NANO
Pin İğne



S NANO
3D NANO
Pin İğne



5D NANO
Pin İğne



Teknik Özellikler

Marka: DEFOND

Model: ULTIMA-A6S

Adaptör: 5V-1000mA

Paket Ağırlığı: 0.073KG

Paket Boyutu: 169*123*56 mm

Paket İçeriği

Ürün	Miktar
Cihaz	1 adet
Adaptör	1 adet
Elektrik Kablosu	1 adet
Şarj cihazı	1 adet
Bataryalar	2 adet
İğne Kartuşu	2 adet
Kullanım Klavuzu	1 adet



Güvenlik Önlemleri

	Yeniden çalışması için üreticiye gönderin.
	Bunu aşağıdaki örnekte olduğu gibi insanlara uygulamayın! 1. Akut hastalığı veya 38 °C'nin üzerinde kanlı hastalığı olan 2. Alerjisi ve hemofilisi olan 3. Yüz melanozu olan kişiler 4. Yüksek iç ısıya sahip olan 5. Düzenli olarak hastane muayenesine gidenler 6. İlaç kullananlar 7. 12 yaşından küçük olanlar
	AC 220V dışındaki güçlerde kullanmayın. Yangınlara veya arızalara neden olabilir
	Yüksek sıcaklık, toz veya nemin olduğu yerlerin yakınında kullanmayın (Nemlendiricinin yakınında). Arızaya neden olabilir.
	Kontrol ünitesini ve gövdeyi onarmayın, sökmeyin veya değiştirmeyin. Arızaya neden olabilir.
	Islak ellerle cihaza dokunmayın veya güç kablolarını çıkarmayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Soyulmuş veya bükülmüş kablo kullanmayın. Yangına neden olabilir (yenisiyle değiştirdiğinizden emin olun).
	Çatlak veya yara izi olan destekli cord kullanmayın. Ciltte yaralara neden olabilir.
	Uzun süre kullanmayacağınız zaman fişini prizden çekin.
	Test için bir kontrol yaptırdığınızdan emin olun. Herhangi bir sorun bulunursa, tamir ettirin.
	Operatör dışında hiç kimse dokunamaz. Kazalara veya arızaya neden olabilir.

	Alternatif akım		Serial No
	Doğru akım		EU Representative
	Sınıf I ekipman		CE işareti
	Dikkat, ekteki belgelere bakın		Üretici firma
	Üretim tarihi		Kayan uygulamalı parça



Garanti Koşulları

Bu cihazın garanti süresi 1 yıldır. Ürünlerimizin satın alındıkları günden itibaren tamirini yapmaktayız. Ürünlerimizden herhangi birinde hasar veya ürün kaynaklı sorun varsa. Onarım veya değişim sunuyoruz.

Genel Bakım

Kullanmadan önce cihazı ve adaptörü kontrol ettiğinizden emin olun

Gücü kapalıyken saklayın. Yüzeyini kuru bir bezle silin.

Doğrudan güneş ışığından veya yüksek sıcaklık ve nemden uzak tutun

Cihazın ölçümünü, onarımını veya değiştirilmesini profesyonel olmayan personele yaptırmayın

Uzun süre kullanılmayan cihazı kullandığınızda, güvenlik açısından düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğinizden emin olun.

ULTİMA-A6S

Üretici Firma :

Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.
2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,
Guangzhou, CHINA



İthalatçı Firma :

EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA

 0850 255 42 42

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :

ÜNVANI: EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD.
NO:11/C KARATAY/KONYA

Müşteri Hizmetleri : +90 (850) 255 42 42

Firma İmza ve Kaşesi :

 **EAST** EAST MEDİKAL
FİRME MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Fevziçakmak Mah. 10669. Sk. YakamoZ Cd. No:111
Tel: 0533 893 25 42 Karatay/KONYA
Selçuk V.D 3231.205 560

Azami Tamir Süresi : 30 Gün

Garanti Süresi : 1 Yıl

Belge Numarası :

Belge Tarihi :

Markası : **Defond**

Modeli : **ULTIMA-A6S**

Cinsi : Dermapen cihazı

SATICI FİRMANIN :

Ünvanı :

Adresi :

Tel :

Fatura Tarihi ve Numarası :

Tarih :/...../202...

İmza :

KAŞE



GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, ürünlerin garanti süresi içinde bedelsiz olarak onarımı söz konusudur.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma, çizme, kimyasal, elektrokimyasal ve elektronik etkiler) kullanılan tesisattan kaynaklı hatalar,
2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşuları,
3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler),
4. **SU SIÇRAMALARI** Sonucu elektronik veya mekanik parçalara verdiği hasarlar,
5. Cihaz kullanırken veya ilk devreye alınana kadar emin olun orta koşullarının uygun olmamasından doğan sorunlar (toz, temizlik, kurum, kapak, su, nem, bakım eksikliği, vb.)
6. Kireç, çamur, çapak, demir ya da pisliklerinden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve hasarlar
7. Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar
8. Elektrik tesisatında sigorta kullanımı, elektrik tesisatında topraklamadan kaynaklanması sorunlar. Kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yüksek ya da alçak ihtiyaçtan kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.[2] Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1. Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
4. İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
5. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.