

Magic Crush

Kullanma Klavuzu



Değerli Müşterimiz, Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha iyi kullanım ve güvenlik için lütfen herhangi bir işlemden önce
bu kılavuzu okuyun.

Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

Teori

1. Titreşimli Masaj Probu

Titreşimli masaj probu, vücudun belirli bölgelerine uygulanan titreşim ve ısı sayesinde rahatlama sağlayan bir araçtır. Bu cihaz, kas kasılmalarını hafifletmeye, sertlikleri gidermeye ve genel olarak vücudun rahatlmasına yardımcı olur.

2. Vakumlu RF Probu (Büyük, Orta, Küçük)

Vücut ve yüzün yeniden şekillendirilmesi için masaj yapar.

Aksesuar listesi

Aksesuar	Miktar
Makine çerçevesi	1 adet
Güç kablosu	1 adet
Vakum RF Büyük başlık	1 adet
Vakum RF Orta başlık	1 adet
Vakum RF Küçük başlık	1 adet
Vakum emme hortumu	1 adet
Titreşimli ısıtma başlığı	1 adet
BIO başlık	1 adet
Güçlü Sihirli başlık	1 adet
Lipo lazer pedleri (Büyük)	6 adet
Lipo lazer pedleri (Küçük)	2 adet
Lipo lazer bandaj	1 set
Demir Merdane	1 adet
Aksesuar tutucu	1 set
Kullanıcı kılavuzu	1 adet

Servis Bakımı

- Cihaz, aksesuarlar ve sarf malzemeleri hariç bir yıl garanti kapsamındadır.
- Sarf malzemelerini ve aksesuarları yenilemek veya satın almak istiyorsanız lütfen distribütörle iletişime geçin.

Aşağıdaki gibi insan kaynaklı arızalar garanti kapsamımız dışındadır.

A. Cihazın müşterinin kendisi tarafından sökülmesi veya dönüştürülmesi nedeniyle oluşan arıza

B. Hatalı veya mantıksız bakımdan kaynaklanan arıza.

C. Cihazın darbe alması veya düşürülmesi

D. Yanlış kullanımdan kaynaklanan arıza.

E. Deprem, yangın felaketi gibi karşı konulmaz felaketlerden kaynaklanan hasarlar.

6. Roller

Vücut şekillenmesinde daha iyi bir etki etmek için silindir ve uzak kızıl ötesi ısıyı kullanarak. Vücut şekillendirme, sıkılaştırma işlemlerini aynı anda hiç acı çekmeden yapabilir.

Özellikler ve İşlevler

Özellikler

- Kanama, şişme ve kan durması olgusuna neden olmaz.
- Yan etkileri ve verilen kiloları geri alma riski olmadığına sonuçlar oldukça açıktır.
- Non-invaziv işlem normal iş ve yaşamı etkilemez.

Fonksiyonlar


Magic Crush cihazının roller başlığı, vücudunuzda keyifli bir masaj deneyimi yaşamanızı sağlayan özel bir aksesuardır. Bu başlık, farklı hızlarda ve yoğunluklarda titreşimler oluşturarak kaslarınızı gevşetir.

İşlem Prosedürleri



(Açılış arayüzü)


Makineyi açtığınızda arayüzü yukarıdaki gibi gösterecektir; her konuma bastığınızda arayüz aşağıdaki gibi görünecektir.

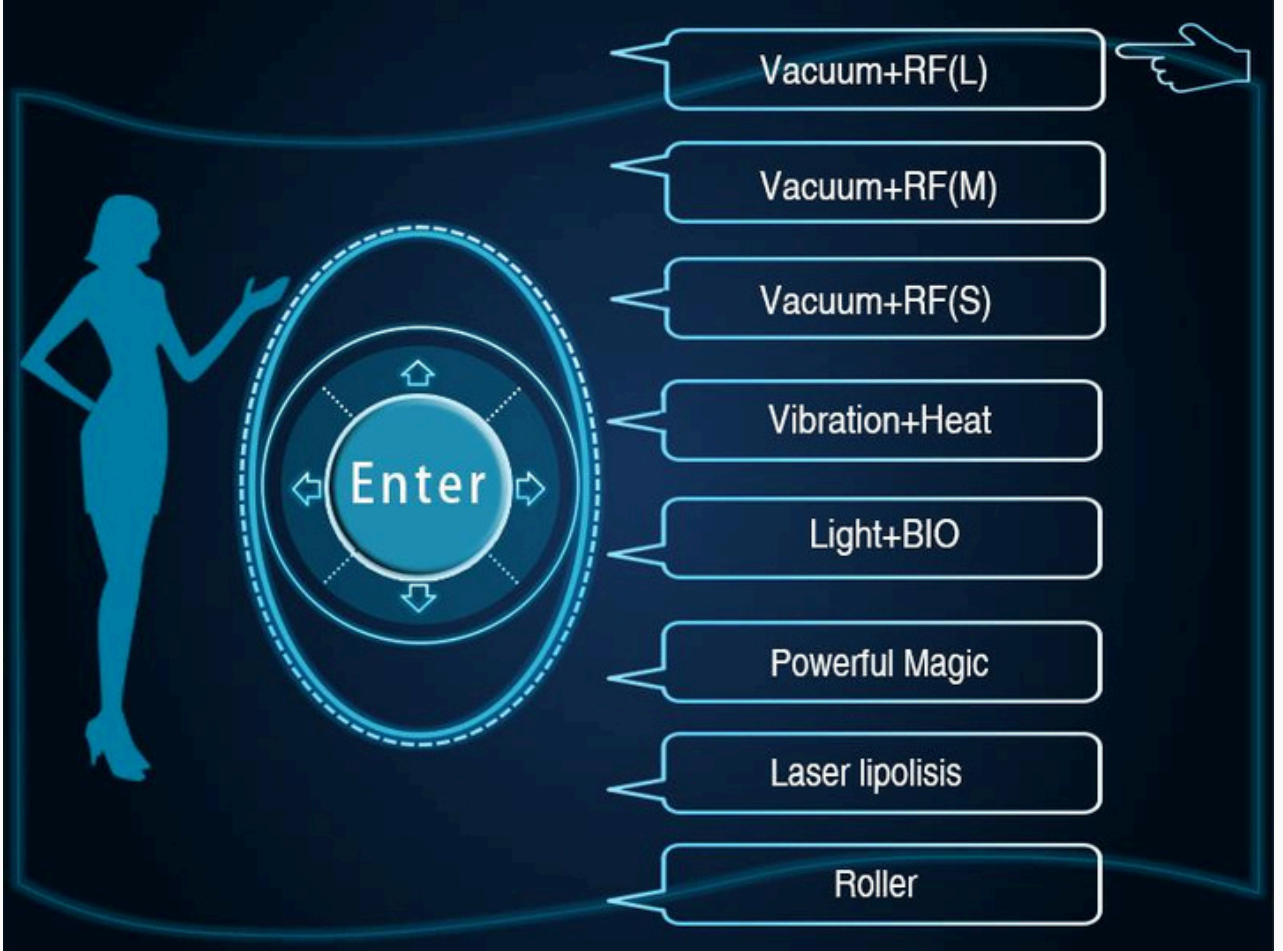


(Ana arayüz)

Vakum+RF(L/M/S)

Ana arayüzde “Vakum+RF(L/M/S)” butonuna bastığınızda makine aşağıdaki gibi sayfaya girecektir.

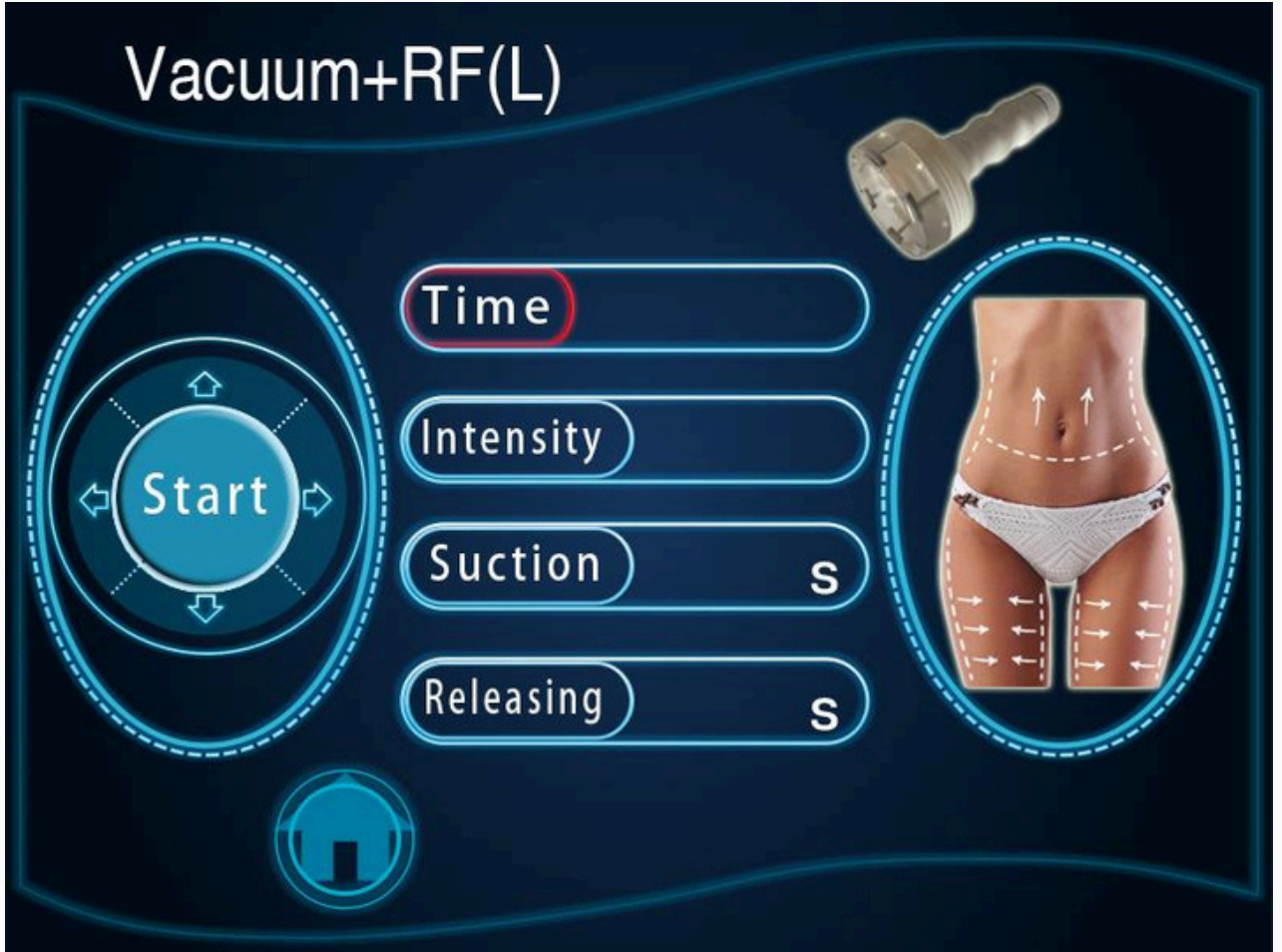


(Vakum RF L)

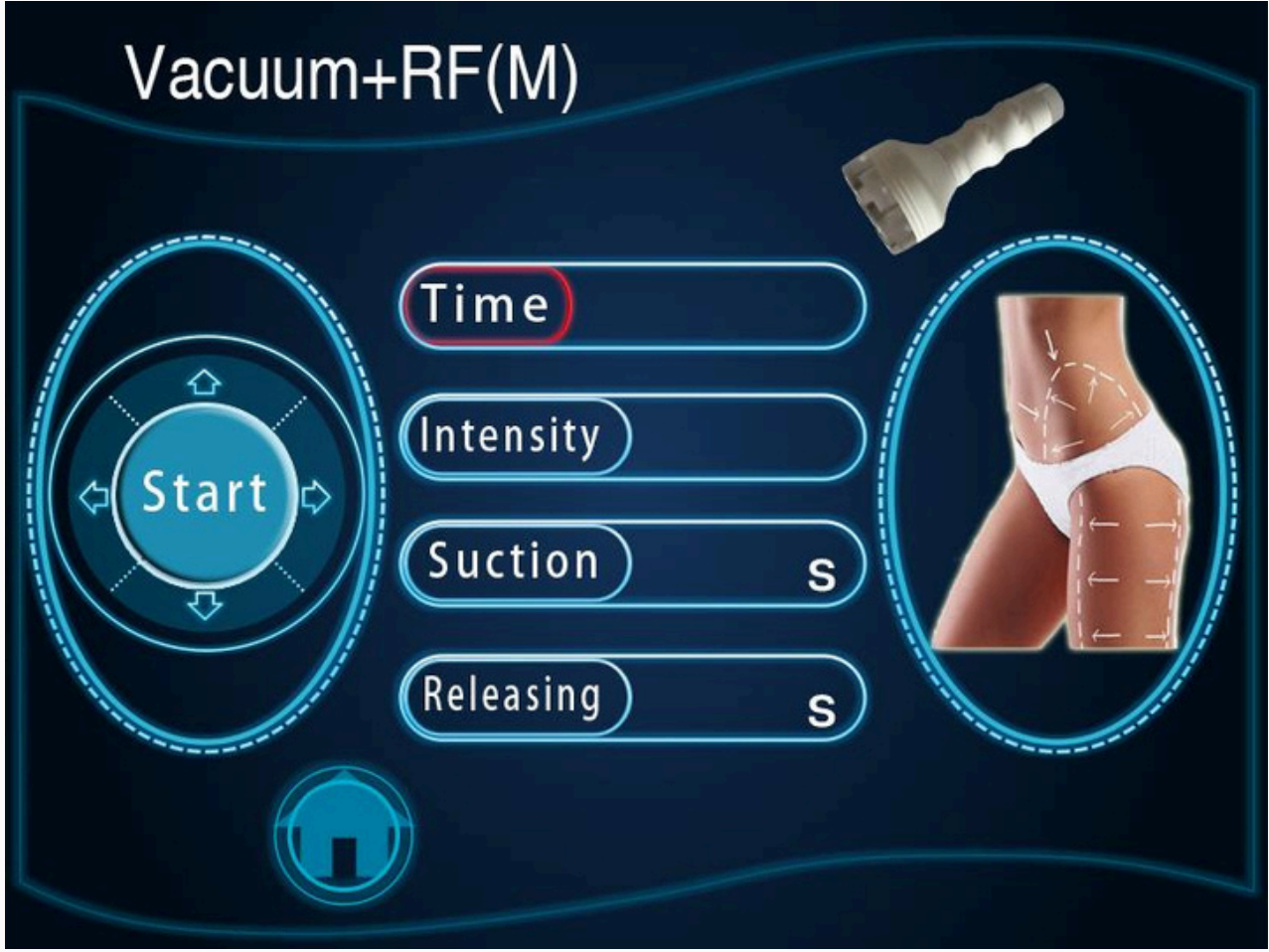

(Vakum RF M)

RF yoğunluğu için yoğunluk

Aspirasyon için emme, aspirasyonu kullandığınızda devam eder Her emme arasındaki aralık süresi için serbest bırakma

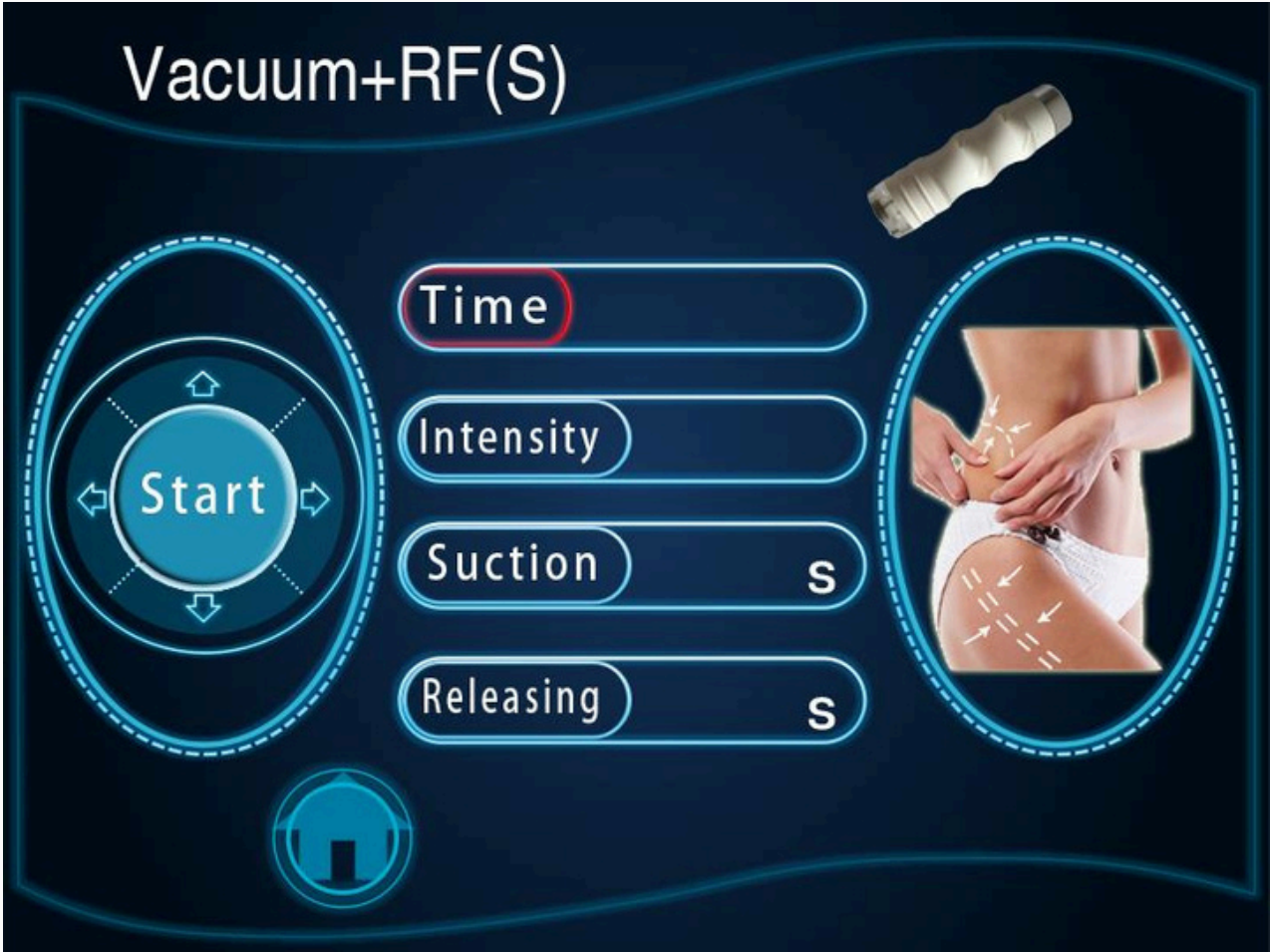


(Vakum RF S)

Seçimleriniz için 3 farklı boyutta Vakum RF kulpları vardır. Müşterilerin işlem alanına göre farklı problemleri seçin. Farklı Çalışma süresi, Yoğunluk ve emme serbest bırakma süresi seçin. Tüm bu veriler ayarlandıktan sonra "Başlat" düğmesine bastığınızda prob çalışmaya başlayacaktır. Hangi vakum RF kolunu seçeceğinize göre hortumu kola bağlayın.

Titreşim ve Isı


Ana arayüzde “Titreşim ve ısı” butonuna bastığınızda makine aşağıdaki gibi sayfaya girecektir.

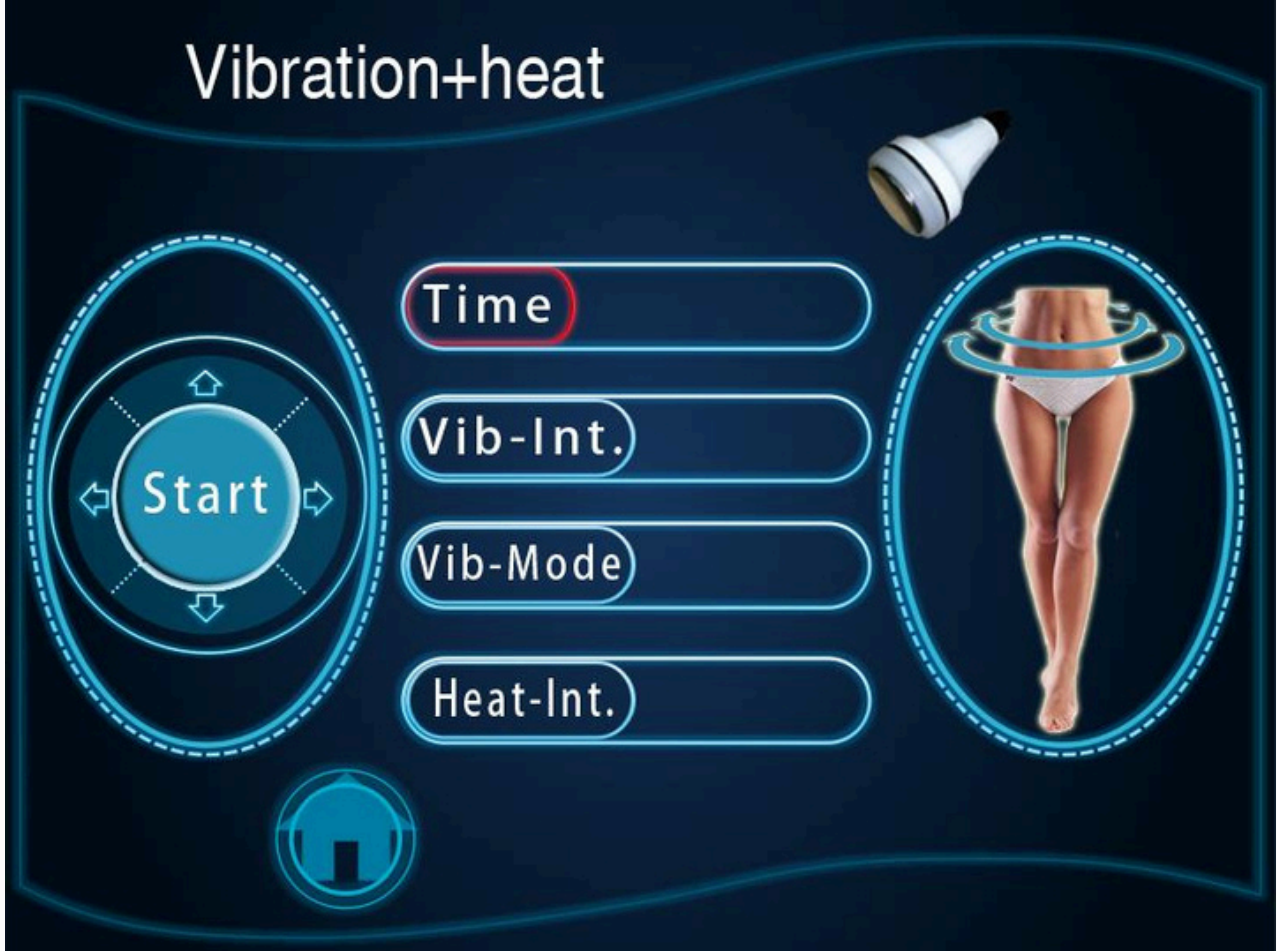

Farklı Çalışma süresi, titreşim yoğunluğu, titreşim modu ve ısı yoğunluğunu seçin. Tüm bu veriler ayarlandıktan sonra “Başlat” düğmesine bastığınızda prob çalışmaya başlayacaktır. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre uygun ısıtma yoğunluğunu seçin. Çalıştırma yöntemi Vakum RF kollarıyla aynıdır.

Işık ve BIO


Ana arayüzde “Light and BIO” butonuna bastığınızda makine aşağıdaki gibi sayfaya girecektir.

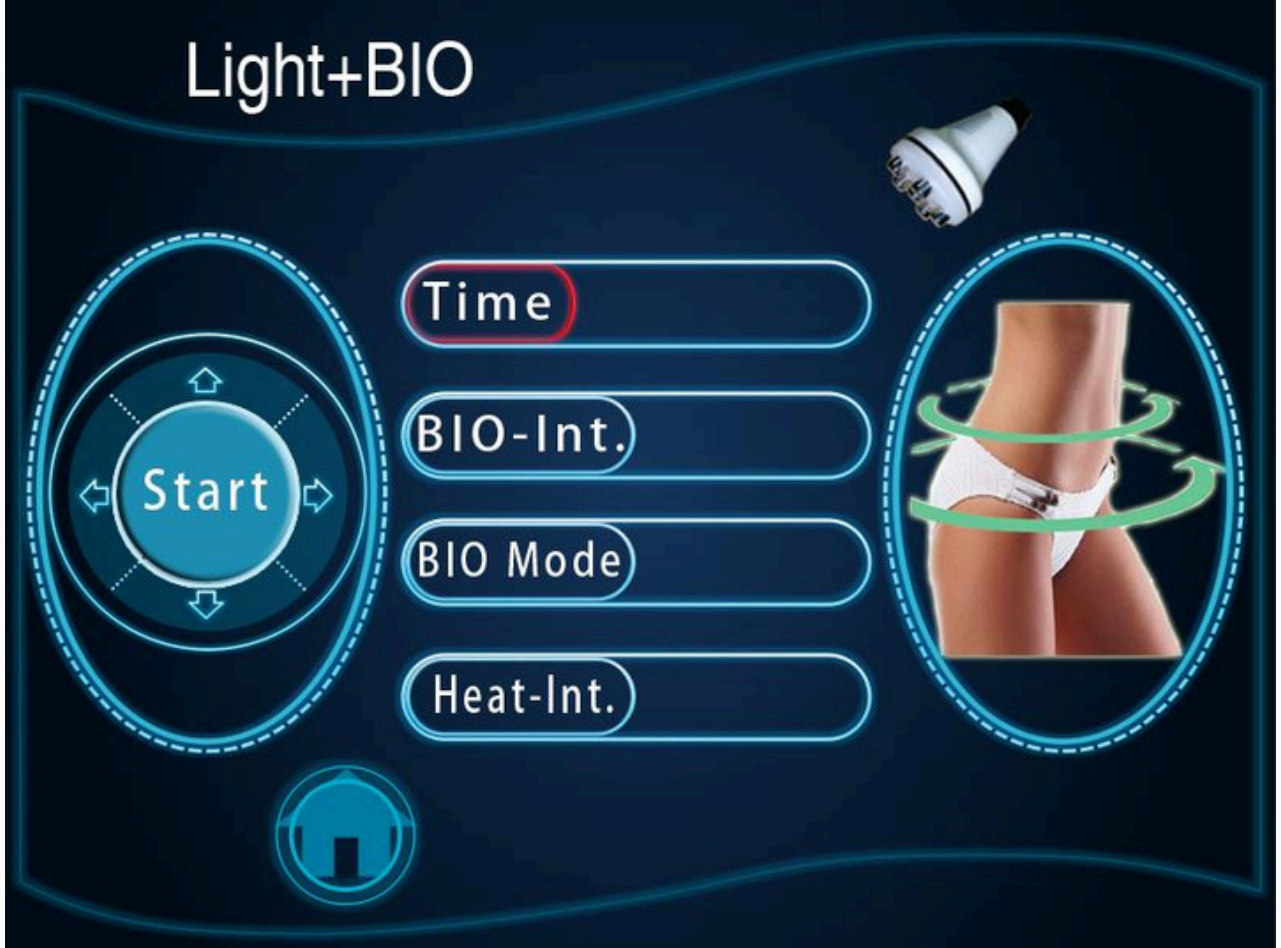

Farklı Çalışma süresi, titreşim yoğunluğu, titreşim modu ve ısı yoğunluğunu seçin. Tüm bu veriler ayarlandıktan sonra “Başlat” düğmesine bastığınızda prob çalışmaya başlayacaktır. Çalıştırma kılavuzu Vakum RF koluyla aynı olmalıdır. Her kullanımdan sonra başlığı uygun şekilde temizleyin.

Lazer Lipoliz

Ana arayüzde “Lazer Lipolisis” butonuna bastığınızda makine aşağıdaki gibi sayfaya girecektir.

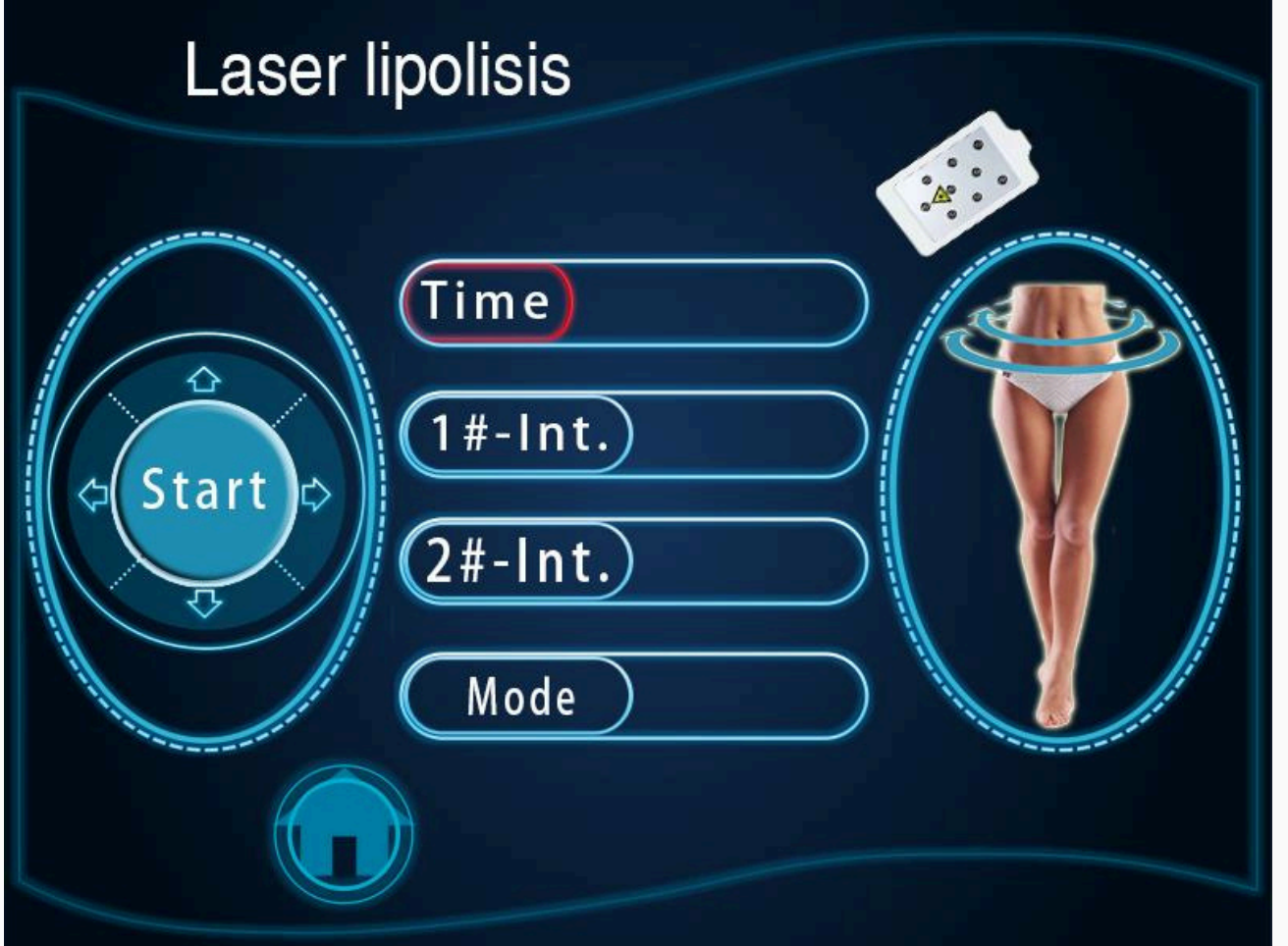

Lipo lazer pedleri için farklı çalışma yoğunluğu ve modu seçin. Tüm bu veriler ayarlandıktan sonra “başlat” butonuna bastığınızda lazer lipoliz çalışmaya başlayacaktır.

1# 4 çıkışı kontrol eder ve 2# aynı anda diğer 4 çıkışı kontrol eder.

Uygun bir seviyeye ayarlayın (müşterilerin kabul edilebilirliğine göre).

Güçlü Sihir


Ana arayüzde “Powerful Magic” butonuna bastığınızda makine aşağıdaki gibi sayfaya girecektir.



1. Farklı Çalışma süresi, yoğunluk ve mod seçin. Yoğunluğu seçin küçükten büyüğe. Tüm bu veriler ayarlandıktan sonra “Başlat” düğmesine basın. sonda çalışmaya başlayacaktır.
2. İşlem yapılması gereken cilde yeterli miktarda jel uygulayınız.
3. Başlığın güçlü geçirgenliği nedeniyle vücudunuzun hiçbir yerinde hareketsiz kalmayın, kemiklerin üzerinde durmayın.

Roller

Ana arayüzde “Silindir” butonuna bastığınızda makine aşağıdaki gibi sayfaya acılacaktır.

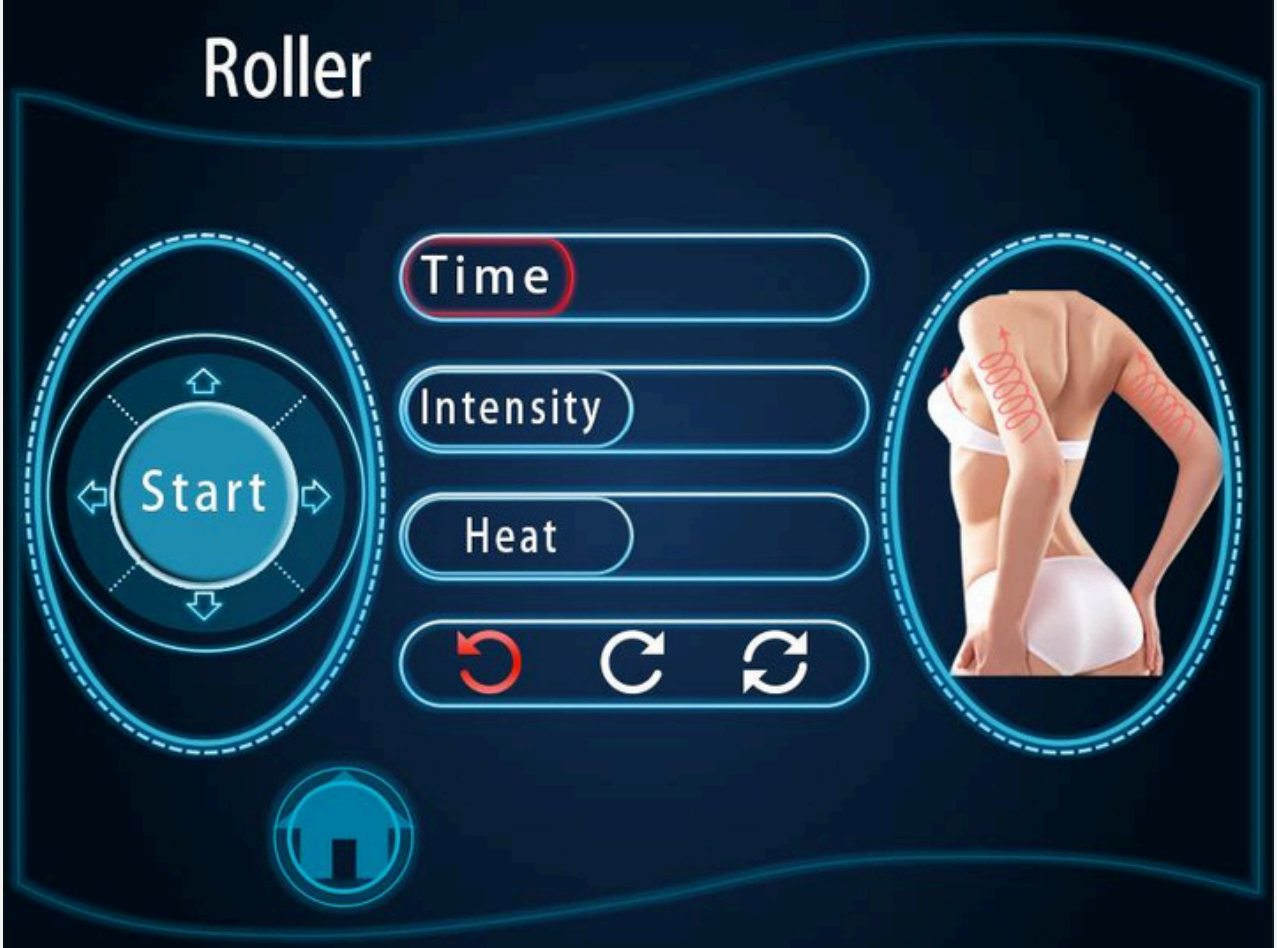

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı yoğunluk ve ısı yoğunluğunu seçin. Silindir için kullanılabilecek 3 mod da mevcuttur.

Fark etme:

Kullanım sırasında silindirin her iki yanından sıkıca tutulması gerekir.

1. Proba jel uygulayın, masaj pozisyonuna getirin ve çalıştırın. çekme tekniğinde başlığı aşağıya doğru sürkleyin yaklaşık 20 dakika boyunca.
2. Kullanım sırasında düşük enerjiyle başlayın. Müşterilerin vücudunda kullanmadan önce ellerinin üst kısmında uygun enerji seviyesini denemenizi öneririz.
3. Çalışırken, yalnızca Vakumlu başlığı cilde takıldıktan sonra çekmeye başlayın. Kullanılmadığı zaman alet probunu kapatın.

Kullanım Kılavuzları

UYLUK

işlem süresi: 30 dakika

1. Vucudu taramak için aşağıdan yukarıya doğru kasıklara doğru itin.
 2. Aşağıdan yukarıya doğru, saat yönünün tersine dairesel bir itme, uygulayın.
 3. Ayrıca aşağı yukarı rahatlatır.
 4. Dizden ve kas dokusundan yukarıya doğru çekin, eğriyi iyileştirebilir.
 5. işlem süresi: 20 ila 30 dakika
1. Lenf yönünde bele doğru çekilerek.
 2. Yukarıdan aşağıya, saat yönünün tersine bir hareketle gelip git hareketini yapın.
 3. Kol kasını yukarı doğru çekerek kasları kaldırın ve sıkın.

GERİ işlem süresi: 20 ila 30 dakika

1. Önce gel-git şeklinde mesane sinirini 2-3 kez iterek.
2. Koltuk altı lenf düğümünü uyarmak için saat yönünün tersine daire çizin.
3. Arka tarafta saat yönünün tersine daire çizerek yağın parçalanmasına yardımcı olabilir.

Tanım : Magic Crush

Model : RU-919R

Üretici Firma :

Manufacturer: **Guangzhou Cynthia Beauty Equipment Co.,Ltd**
3 Floor, 3 Building, Shunxiang Industrial Zone, Jiahe Street, Baiyun

İthalatçı Firma :

EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA

 0850 255 42 42

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :

ÜNVANI: EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD.

NO:11/C KARATAY/KONYA

Müşteri Hizmetleri : +90 (850) 255 42 42

Firma İmza ve Kaşesi :


EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Fevziçakmak Mah. 10659. Sk. Yakamoz Cd. No:C11
Tel: 0533 693 25 42 Karatay/KONYA
Selçuk V.D 3231 205 560

Azami Tamir Süresi : 30 Gün

Garanti Süresi : 1 Yıl

Belge Numarası :

Belge Tarihi :

Markası : **Defond**

Modeli : **RU-919R**

Cinsi : **Magic Crush**

SATICI FİRMANIN :

Ünvanı :

Adresi :

Tel :

Fatura Tarihi ve Numarası :

Tarih :/...../202...

İmza :

KAŞE

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar.

Fatura ile geçerlidir.



GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, ürünlerin garanti süresi içinde bedelsiz olarak onarımı söz konusudur.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma, çizme, kimyasal, elektrokimyasal ve elektronik etkiler) kullanılan tesisattan kaynaklı hatalar,
2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşuları,
3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler),
4. **SU SIÇRAMALARI** Sonucu elektronik veya mekanik parçalara verdiği hasarlar,
5. Cihaz kullanırken veya ilk devreye alınana kadar emin olun orta koşullarının uygun olmamasından doğan sorunlar (toz, temizlik, kurum, kapak, su, nem, bakım eksikliği, vb.)
6. Kireç, çamur, çapak, demir ya da pisliklerinden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve hasarlar
7. Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar
8. Elektrik tesisatında sigorta kullanımı, elektrik tesisatında topraklamadan kaynaklanması sorunlar. Kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yüksek ya da alçak ihtiyaçtan kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. [2]
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1. Tüketicilere teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
4. İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
5. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.