

# PORTABLE PASİF JİMLASTİK CİHAZI

## KULLANIM KLAVUZU



## Portable Ems stimulation machine RU-800S

Sevgili müşterimiz, ürünümüzü satın aldığınız için teşekkürler!  
En iyi deneyim ve güvenlik için lütfen herhangi bir işlemden  
önce bu kullanım kılavuzunu okuyun.

## • Giriş

### Vücut Şekillendirme Cihazı: Müşterilerinizin İhtiyaçlarına Göre Tasarlan


Vücut Şekillendirme Cihazı, müşterilerinizin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, kullanımı kolay ve etkili bir cihazdır.

#### Cihazın Özellikleri:

- Müşteri Odaklı Tasarım: her müşterinin ihtiyacına özel çözümler sunmak için tasarlanmıştır.
- Kolay Kullanım: Cihazın kullanımı oldukça basittir ve herhangi bir özel eğitim gerektirmez.
- Çok Yönlülük: Meme küçültme, meme kaldırma, meme dolgunlaştırma, gibi birçok farklı amaç için kullanılabilir.
- Bilimsel Temelli Teknoloji: Cihaz, biyo dalga prensibi ve mikro akım teknolojisi gibi bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler kullanır.



## Gösterge paneli

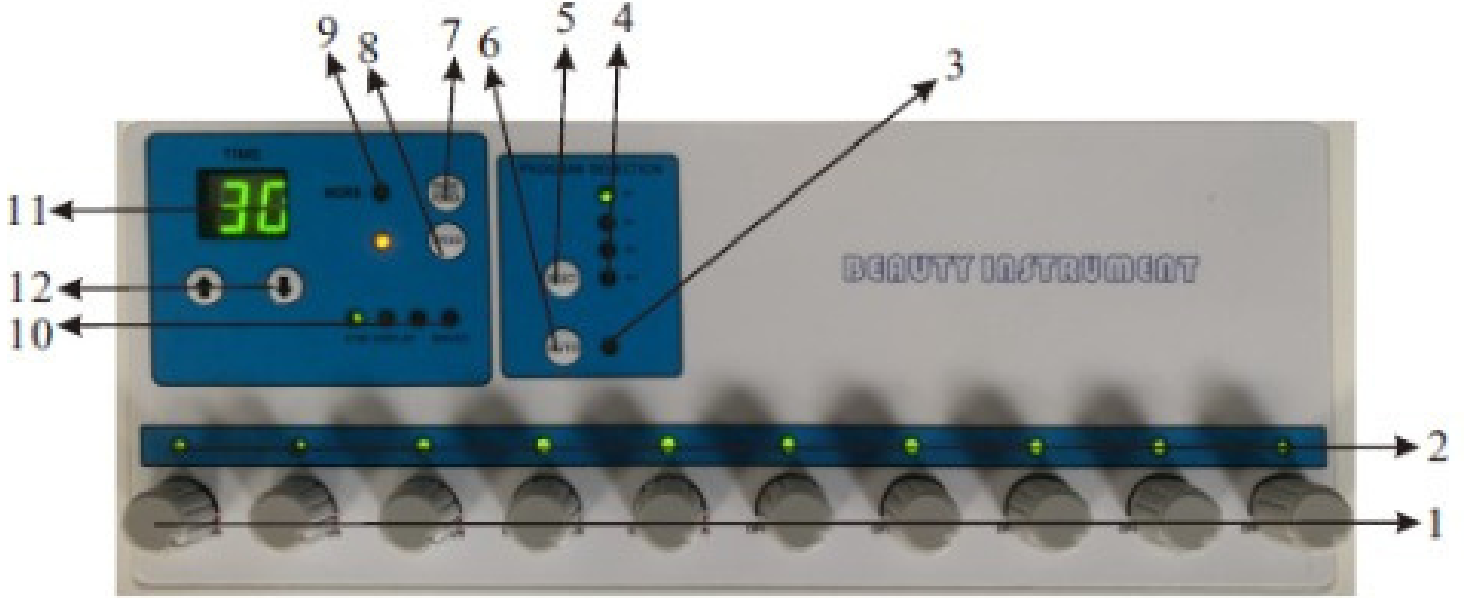

1. Çalışma yoğunluğu ayar düğmeleri
2. Her setin gösterge ışığı
3. Otomatik mod gösterge ışığı
- 4.PI, P2, P3, P4 çalışma modu gösterge ışığı
- 5.PI, P2, P3, P4 çalışma modu seçme düğmesi
6. Otomatik mod seçme düğmesi
7. Güç düğmesi
8. Çalışma dalgası seçme düğmesinin frekansı
9. Güç gösterge ışığı
10. Çalışma dalgası gösterge ışığı
11. Çalışma süresi gösterge çerçevesi
12. Çalışma süresi ayarlama düğmesi

## İşlevler

- Vücut şekillendirme: Gevşek kasları basitçe çalıştırarak çalıştırılmayan kasları sıkılaştırmak için koşma, ip atlama, mekik çekme gibi sert egzersizlerle kasların uyarılmasını taklit edin)
- Göğüs bakımı (sıkılık): Pektoralis majör, pektoralis minör ve serratus kaslarını güçlendirmek için göğüs genişletme egzersizini taklit edin, mikro akımla kas sinirlerini uyarın, anterior, epidermis ve "dermisteki kılcal damarları ve sinirleri uyarın, oksijen ve besin sağlamak için hücrenin hidrasyon üretimini sağlayın, sarkık göğsün elastikiyetini geri kazanın.

## Kullanım Talimatı

1. Güç hattını bağlayın ve güç anahtarına basın. Yoğunluk ayar düğmelerinden herhangi biri sıfıra döndürülmemişse, zil sesi duyulacaktır.

2. P1 - P4 arasından bir çalışma modu seçmek için "SELECT" düğmesine basın veya "AUTO" düğmesine basın. P1 - P4 arasından bir mod seçilirse, ilgili gösterge ışığı yanacaktır, otomatik mod seçilirse, Otomatik mod gösterge ışığı yanacaktır.

3. Çalışma dalgasının frekansını seçmek için "SPEED" düğmesine basın.

Otomatik modu seçerseniz bu adımı atlayın.

4. Çalışma süresini ayarlayın.

5. Elektrotları prize takın, işlem gören kısma yerleştirin ve sabitlemek için kemeri kullanın. Lütfen bunları kalbe doğru koymayın. Elektrotların nasıl yerleştirileceğine dair gösterge şemasına bakın.

6. "PAUSE/START" düğmesine basın ve makine çalışmaya başlayacaktır.

İlgili düğme ile yoğunluğu müşterinin dayanabileceği uygun bir seviyeye ayarlayın.


İşlem bittikten sonra gücü kapatın.

### **Elektrotların nasıl yerleştirileceğine dair gösterge şeması**

Elektrotları 10 sete ayırın, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi parçanın üzerine yerleştirin. Elektrotları koymak için yeterli yer yoksa, bir elektrotun 1/4 veya 1/3'ünü başka bir elektrotla kapatabilirsiniz. Elektrodu vücudun iki tarafında kesiştirmeyiniz. Eğer iki kısımda uygulama yapılacaksa, lütfen elektrotların sırasını erteleyin.

Örneğin: Hem karında hem de bacakta uygulama yapılıyorsa, elektrotların sırası

karındaki elektrotların sırası 1, 2.. ve bacadaki 5, 6.. olacaktır.

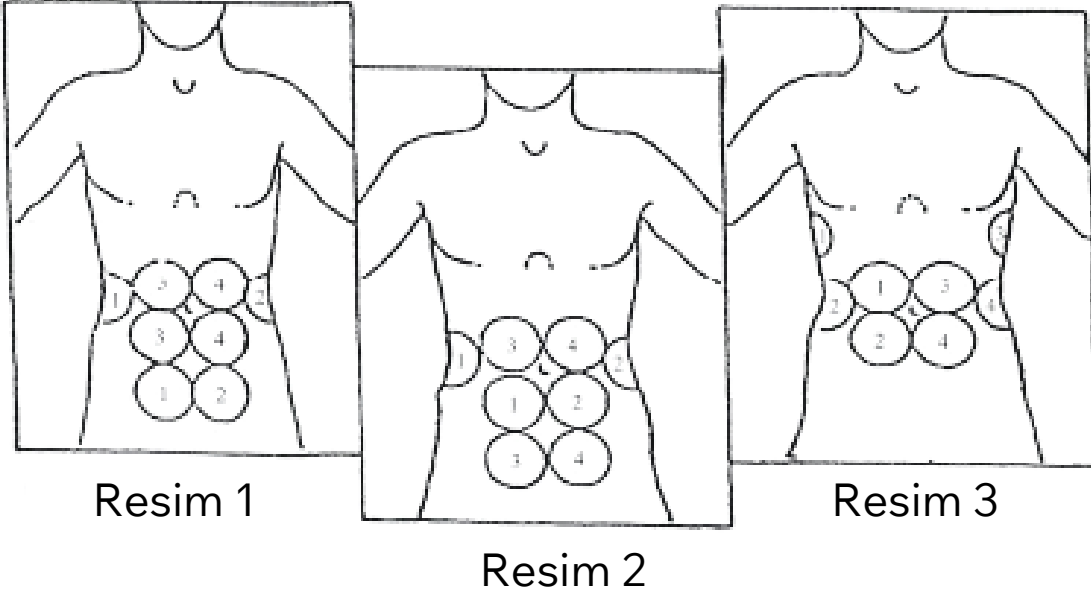


Resim 1, 2, 3 bel ve karın bölgesini işlem görünmektedir.

Elektrotları Resim 1'deki gibi yerleştirerek ön karın ve göbek gevşekliği azaltabilirsiniz.

Resim 2'deki gibi yerleştirmek sarkık karnı düzeltebilir.

Resim 3'teki gibi yerleştirmek belin her iki tarafındaki gevşekliği azaltabilir ve sarkık beli kaldırabilir.

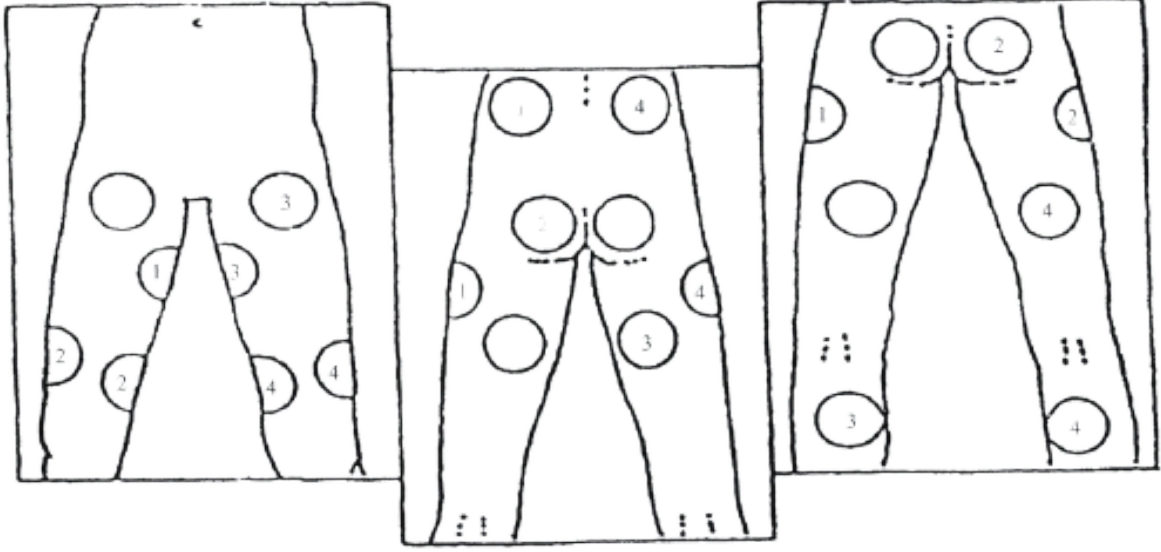

Resim 7


Resim 8

Resim9

Resim 4'teki gibi yerleştirildiğinde bel ve karın altı gevşekliđi azaltılabilir.

Resim 5'teki gibi yerleřtirmek i ve dıř uyluktaki gevşekliđi azaltabilir ve bu bölgelerdeki gevşek kasları sıkılařtırabilir.

Resim 6'daki gibi yerleřtirmek kucak ve i uyluktaki gevşekliđi azaltabilir ve bu bölgelerdeki gevşek kasları sıkılařtırabilir.

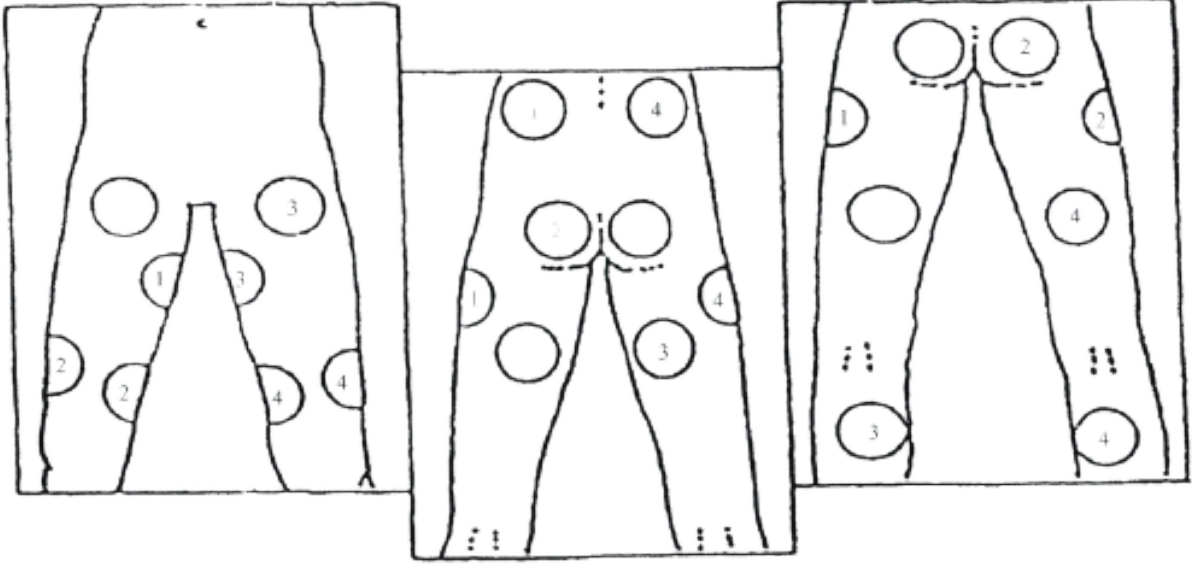

Resim 7

Resim 8


Resim 9

Resim 7'deki gibi yerleřtirmek kucak ve üst iç uyluktaki gevşekliđi ve diz üstündeki gevşekliđi azaltabilir ve bu kısımların gevşek kaslarını sıkılařtırabilir.

Resim 8'deki gibi yerleřtirmek üst ve alt kalçadaki gevşekliđi ve dış uyluktaki gevşekliđi azaltabilir ve bu kısımların gevşek kaslarını sıkılařtırabilir.


Resim 9'daki gibi yerleřtirmek orta ve alt kalçadaki gevşekliđi, dış ve sırt uyluktaki gevşekliđi ve baldırdaki gevşekliđi azaltabilir. Ve bu bölgelerdeki gevşek kasları sıkılařtırabilir.



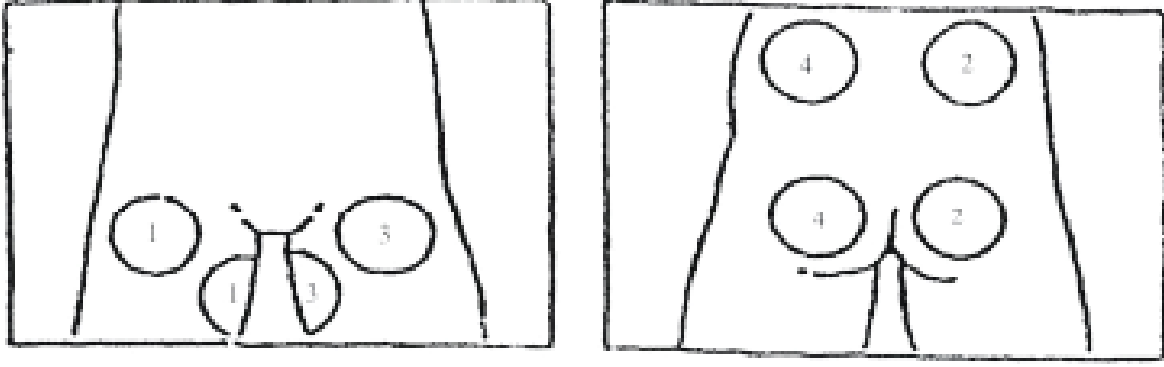




Resim 10

Resim 10'daki gibi bir yer kucak ve iç uyluktaki gevşekliği , üst ve alt kalçadaki gevşekliği azaltabilir ve bu bölgelerdeki gevşek kasları sıkılaştırabilir.


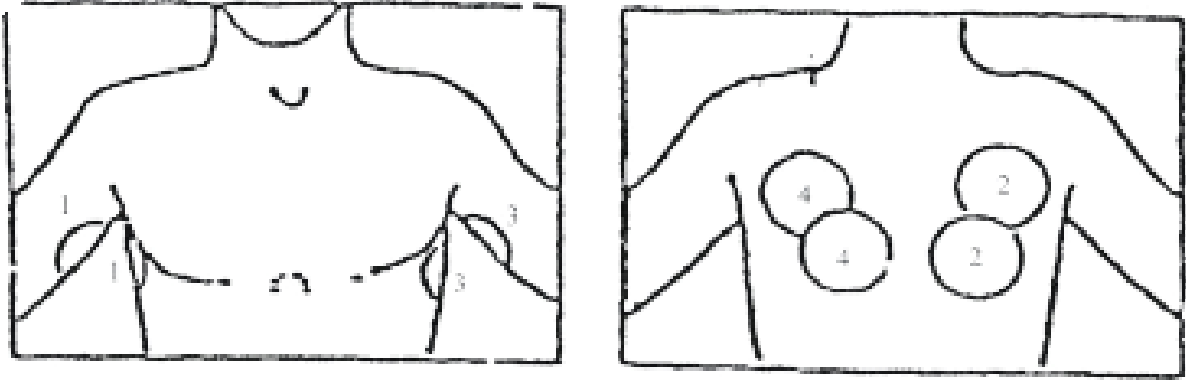


Resim 11

Resim 11'deki gibi bir yer, kolun iç kısmındaki ve kürek kemiğindeki gevşekliği ve sırttaki gevşekliği azaltabilir. Ve bu bölgelerdeki gevşek kasları sıkılaştırabilir.

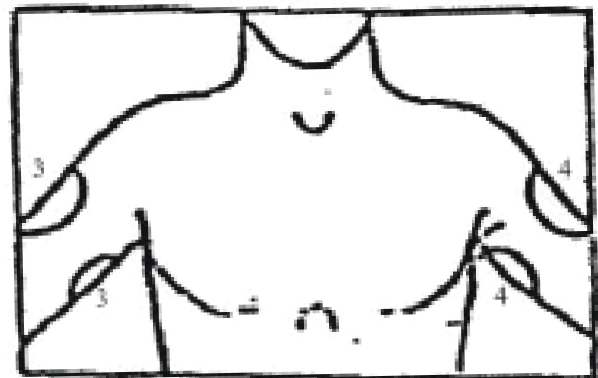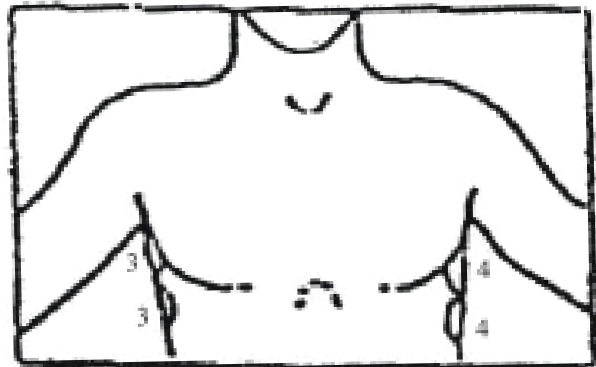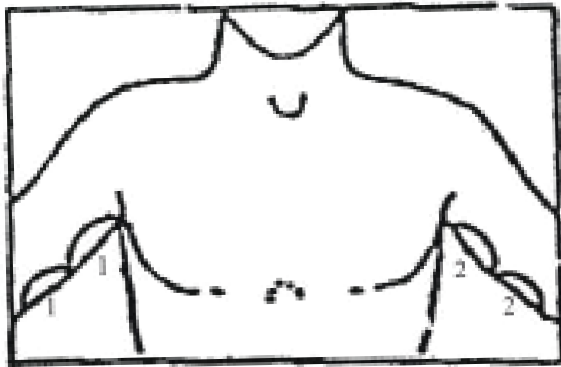

Resim 12

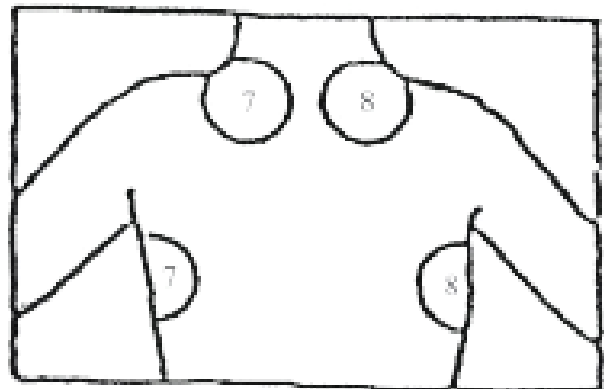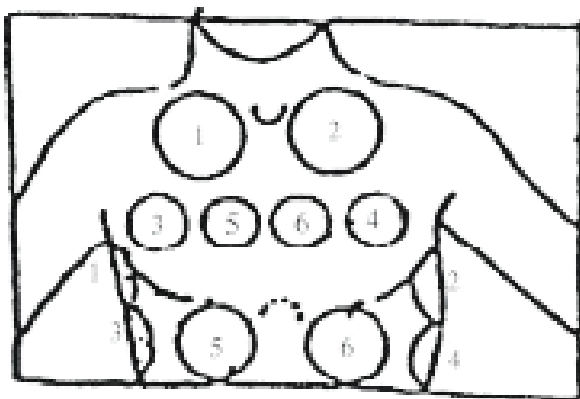

Resim 13

Resim 12'deki gibi bir yer, iç ve dış koldaki sarkıklığı azaltabilir. Ve bu kısımlardaki gevşek kasları sıkılaştırabilir.

Resim 13'teki gibi yerleştirmek göğüs çevresindeki gevşekliliği azaltabilir.

## Uyarılar

- Lütfen elektrotları yaralı ve iltihaplı kasların üzerine yerleştirmeyin.
- Lütfen elektrotları 10 ay içinde ameliyat edilmiş kısımlara yerleştirmeyin.
- Lütfen yemekten sonraki 1 saat içinde karın bölgesine uygulama yapmayın.
- Kalp hastalığı olan kişiler lütfen bu makineyi kullanmayınız.
- Ciddi mide hastalığı, enterohepatit, vezikal taş ve nefroliti olan kişiler lütfen bu makineyi kullanmayın.
- Epilepsi ve alkolizm hastaları lütfen bu makineyi kullanmayınız.
- Hamile kadınlar lütfen bu makineyi kullanmayın.



# Portable Ems stimulation Machine RU-800S

**Üretici Firma :**

**CYNTHIA**

Manufacturer: **Guangzhou Cynthia Beauty Equipment Co.,Ltd**  
3 Floor, 3 Building, Shunxiang Industrial Zone, Jiahe Street, Baiyun

**İthalatçı Firma :**

**EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.**

Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi  
42050 Karatay KONYA

# GARANTİ BELGESİ

**İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :**

**ÜN VANI: EAST MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.**

**ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD.**

**NO:11/C KARATAY/KONYA**

**Müşteri Hizmetleri : +90 (850) 255 42 42**

**Firma İmza ve Kaşesi :**

  
**EAST MEDİKAL**  
EAST MEDİKAL İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.  
Fevziçakmak Mah. 10659. Sk. Yakamoz Cd. No:C11  
Tel: 0533 693 25 42 Karatay/KONYA  
Selçuk V.D 3231 205 560

**Azami Tamir Süresi : 30 Gün**

**Garanti Süresi : 1 Yıl**

**Belge Numarası : .....**

**Belge Tarihi : .....**

**Markası : CYNTHIA**

**Modeli : RU-800S**

**Cinsi : PORTATİF PASİF  
JİMLASTİK CİHAZI**

**SATICI FİRMANIN :**

**Ünvanı : .....**

**Adresi : .....**

**Tel : .....**

**Fatura Tarihi ve Numarası : .....**

**Tarih : ...../...../202...**

**İmza :**

**KAŞE**

# GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, ürünlerin garanti süresi içinde bedelsiz olarak onarımı söz konusudur.

## GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma, çizme, kimyasal, elektrokimyasal ve elektronik etkiler) kullanılan tesisattan kaynaklı hatalar,
2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşuları,
3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler),
4. **SU SIÇRAMALARI** Sonucu elektronik veya mekanik parçalara verdiği hasarlar,
5. Cihaz kullanırken veya ilk devreye alınana kadar emin olun orta koşullarının uygun olmamasından doğan sorunlar (toz, temizlik, kurum, kapak, su, nem, bakım eksikliği, vb.)
6. Kireç, çamur, çapak, demir ya da pisliklerinden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve hasarlar
7. Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar
8. Elektrik tesisatında sigorta kullanımı, elektrik tesisatında topraklamadan kaynaklanması sorunlar. Kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yüksek ya da alçak ihtiyaçtan kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar.

## GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.[2]  
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1. Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
4. İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
5. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.